

Série DS 610 G2

Gamme de laveurs-désinfecteurs d'instruments d'une capacité de 12 plateaux DIN



Steelco

Miele Group Member

Fabricant et fournisseur mondial pour les solutions de nettoyage et de stérilisation

Né de Steelco et Belimed, SteelcoBelimed est un pionnier des solutions de flux de travail stériles alliant innovation, fiabilité et orientation client. "Innover en toute confiance" définit notre engagement à fournir des produits et des services de haute qualité, en établissant de nouvelles normes industrielles dans le domaine du contrôle des infections et des sciences de la vie.

Orientation client

Notre engagement à comprendre pleinement les besoins et la satisfaction de nos clients est une priorité. Nos produits et services sont conçus pour répondre à ces besoins spécifiques, garantissant que chaque décision prise profite à nos clients pour les meilleurs résultats.

Innovation

Notre volonté à innover nous pousse à chercher et à adopter en permanence de nouvelles idées, technologies et méthodes. Cet engagement garantit l'évolution et l'amélioration constantes de nos produits et services.

Durabilité

Notre planète, notre responsabilité.
Chez SteelcoBelimed, le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons : de l'optimisation des processus de production à la réduction de la consommation d'énergie, à la création de produits qui favorisent la protection de l'environnement. Pour nous, protéger l'avenir signifie agir aujourd'hui. Avec intégrité, détermination et un profond respect des personnes et de la planète.



Fiabilité

Notre engagement est d'atteindre les plus hauts niveaux de productivité grâce à l'optimisation des processus, des ressources et des opérations. En proposant systématiquement des solutions fiables, nous assurons la création de valeur tout en minimisant les inefficacités. Notre objectif est d'établir des relations durables fondées sur la confiance, l'intégrité et le respect mutuel en honorant nos engagements de manière fiable

DS 610 G2

Laveurs Désinfecteurs

Nos laveurs-désinfecteurs DS 610 G2 offre des solutions flexibles et à haut rendement pour les cliniques et les centres de stérilisation.

Conçu pour réduire la consommation d'eau et d'énergie, il favorise une productivité élevée et peut réduire la consommation de ressources de plus de 50 %.

Il assure un traitement complet : lavage, thermo-désinfection et séchage filtré HEPA 14. Une pompe à vitesse variable optimise la pression et la consommation d'eau en fonction de la charge et de la phase du cycle. Nos laveurs-désinfecteurs sont synonymes de sécurité, de qualité, de traçabilité et de faibles coûts d'exploitation.



DS 610 G2

Porte manuelle escamotable simple ou traversante capacité 12 plateaux DIN
volume de la chambre 253 litres

DS 610 SL G2

Porte coulissante automatique simple ou traversante/s
capacité 12 plateaux DIN
volume de la chambre 255 litres



Principaux avantages une combinaison gagnante

Efficacité écologique

Les laveurs-désinfecteurs Steelco sont conçus pour offrir les meilleures solutions de leur catégorie en matière de réduction de la consommation d'énergie et d'eau, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier des coûts d'exploitation les plus bas par charge.

Accent sur la qualité des processus

Steelco et Miele R&D travaillent ensemble pour développer des solutions innovantes qui peuvent améliorer l'efficacité du cycle et la sécurité tout en réduisant la durée du processus et la consommation d'énergie.

Flexibilité, contrôle et connectivité

L'écran tactile couleur de haute qualité, associé à une connexion Wi-Fi et Ethernet, garantit une interaction intuitive avec l'opérateur et un excellent contrôle de l'ensemble du processus. En outre, SmartHub Flow permet de visualiser à distance les performances de l'appareil en temps réel et dans le passé.

Vitesse de traitement optimisée

Notre objectif est de fournir à nos clients les processus de lavage et de désinfection les plus rapides possibles, conformément aux normes internationales et locales. Consultez les options du DS 610 G2 pour économiser du temps et de l'énergie.

Système de chargement flexible

Une flexibilité maximale combinée à une utilisation intuitive.

Le système modulaire d'étagères de lavage offre à la fois une spécialisation et une grande flexibilité lors du chargement du laveur-désinfecteur.

Options de chargement multiples

Une gamme complète de servantes de transfert, de convoyeurs et de fenêtres ou de trappes de passage complète le système pour optimiser votre flux de travail.

Installation facile Plug & Play

Malgré sa capacité de 12 DIN, le DS 610 G2 est compact et prêt à l'emploi, ne nécessitant que l'alimentation électrique, l'eau et le drainage. Il est conçu pour passer par les portes et les ascenseurs, avec un socle à roulettes pour un positionnement facile. Idéal pour les cliniques et les CSSD de taille moyenne, le modèle à porte coulissante permet un chargement et un déchargement automatisés.



Efficacité et durabilité

Se réunir

Accélérer le cycle tout en économisant du temps et de l'énergie

Grâce à la disponibilité de la cuve préchauffée de l'option Fast Cycle, il est possible de gagner du temps et de disposer plus rapidement des articles retraités sans diminuer la qualité du processus. Le temps de chauffage de la phase de rinçage final peut être réduit de 80 % dans des conditions d'utilisation moyennes.



Lavage principal

Performances de lavage maximales avec un nettoyage complet et rapide.

Phase de rinçage

performance de rinçage sûre avec une consommation d'eau réduite.

Des niveaux d'efficacité inégaux, une réduction de la consommation d'énergie et d'eau avec les coûts d'exploitation les plus bas par charge.

La pompe à vitesse variable permet d'ajuster la pression de circulation (performance maximale en cas de besoin) et la consommation d'eau (économie d'eau lorsque cela est possible). Les performances de lavage sont donc toujours optimales et peuvent être contrôlées avec précision.

Séchage à l'air forcé et filtré

Le séchage à l'air chaud et forcé permet d'obtenir des produits parfaitement secs. Un filtre HEPA H14 garantit des résultats exempts de toute contamination. Le capteur d'humidité (en option) garantit un séchage efficace des produits, avec un minimum de temps et d'énergie.

Matériaux de qualité supérieure, appareils conçus pour durer

La chambre, les bras de pulvérisation et les filtres du carter sont fabriqués en acier inoxydable AISI 316 L de haute qualité et électropoli, ce qui garantit la propreté, la fiabilité à long terme et le recyclage facile du produit à la fin de sa durée de vie.

Le cadre structurel du DS 610 G2 est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour garantir une plus longue durée de vie.




Résumé des options d'efficacité et de durabilité

Power Pulse Cleaning
Réservoir de préchauffage
Séchage dynamique
Condenseur à vapeur



DS 610 G2

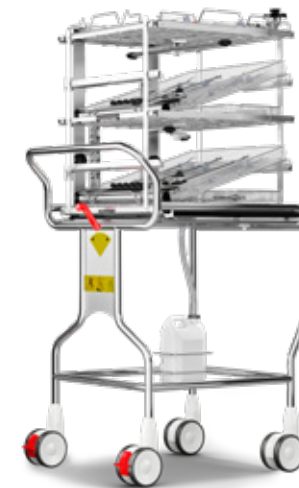

DS 610 SL G2

Flexibilité des options après-vente

Steelco propose des kits de mise à niveau pour les appareils existants afin de s'adapter aux exigences :

- Capteur de conductivité pour une meilleure qualité des résultats du rinçage final
- Pompe de vidange pour s'adapter aux vidanges en hauteur ou à distance
- Phase de séchage contrôlée par un capteur d'humidité
- ... et bien plus encore



Exigences minimales en matière d'entretien

Entretien très simplifié et rentable.
Accès frontal à tous les composants. Les unités sont équipées de rouleaux pour un positionnement rapide et facile et de pieds fixes.

Qualité des processus

Une unité qui s'assemble

Grâce à son faible encombrement, la grande capacité du DS 610 G2 Serie n'affecte pas l'espace d'un service.

L'installation simplifiée "plug and play" ne nécessite que des connexions flexibles au réseau électrique, à l'arrivée d'eau et à la vidange.

Flexibilité de la configuration

En fonction des équipements disponibles, les Steelco DS 610 G2 et DS 610 SL G2 peuvent être configurés pour :

- chauffage électrique
- chauffage indirect à la vapeur externe réduisant les besoins globaux en énergie électrique
- chauffage mixte permettant de passer du chauffage à vapeur au chauffage électrique en tant que solution de secours.


Un adoucisseur d'eau intégré est disponible en option et peut être complété en cas de mauvaise qualité de l'eau entrante ou de départements très fréquentés avec de l'eau traitée en externe.

Le laveur peut être installé avec ou sans ventilation, avec des options de condensation de la vapeur.

Je suis prêt !

L'état de l'appareil et, par conséquent, la disponibilité du laveur d'instruments sont clairement indiqués par le changement de couleur de la lampe de la chambre.

Blanc : cycle en cours - Vert : processus terminé OK
- Rouge : alarme active

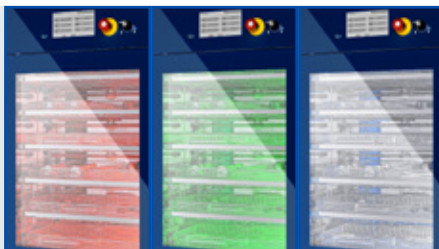



Flexibilité et contrôle

Un ensemble cohérent

Le grand panneau de commande à écran tactile de 7 pouces (des deux côtés pour les appareils à double porte) facilite le contrôle de l'appareil grâce à des informations claires et faciles à lire, même à distance : une aide intuitive et pratique pour les opérateurs dans leurs tâches quotidiennes. En outre, la conception bien pensée et conviviale est cohérente dans toute la gamme de nos appareils, ce qui favorise une utilisation intuitive et des processus fiables.

Une interface conviviale


Le grand écran tactile de 7 pouces facilite le contrôle de l'appareil grâce à des informations claires et faciles à lire, même à distance. Les opérateurs sont assistés à chaque étape par des commandes claires et intuitives.

Mode service technique

Les laveurs-désinfecteurs sont conçus pour simplifier l'entretien. Un panneau synoptique facile à lire permet d'avoir une vue d'ensemble de l'état de la machine et des composants, ce qui accélère les interventions de maintenance.

Contrôle des performances de lavage et de la qualité du rinçage final

L'IHM affiche les paramètres de pression de lavage et de conductivité de l'eau au cours des différentes phases du processus.

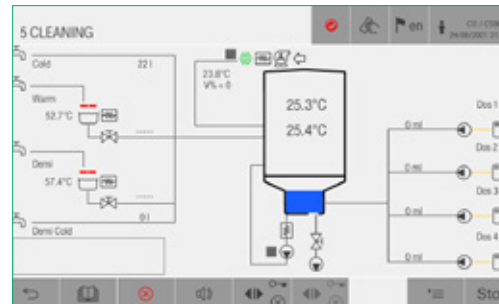


Panneau synoptique facile à lire

Niveaux d'accès utilisateur

Cinq niveaux d'accès garantissent que seul le personnel formé a accès à des fonctions spécifiques : opérateur, chef de service, technicien de service sur le site du client, technicien de service autorisé et fabricant.

Stockage des données du cycle

Les données du cycle sont stockées et disponibles à partir de l'imprimante intégrée en option et, si l'appareil est connecté au réseau, les données peuvent être envoyées à un système de traçabilité centralisé.

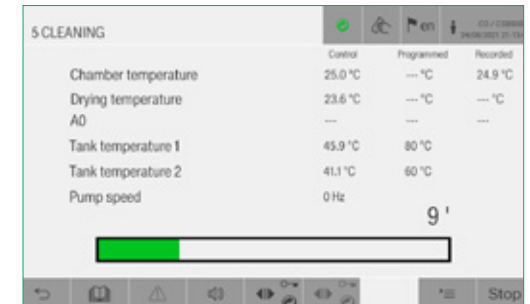

L'état des cycles et les messages d'alarme sont très visibles.

Solution de numérisation

Logiciel de gestion et de suivi

Garantir la disponibilité des instruments au bon endroit, au bon moment, retraités selon la norme appropriée dans les meilleurs délais et au moindre coût.

SmartHub Connect


SmartHub Connect est une solution logicielle sur site qui collecte des données à partir d'équipements compatibles et les envoie à un système de suivi des instruments. Les utilisateurs bénéficient d'une transparence totale grâce à un tableau de bord visuel qui affiche l'état des programmes et des cycles pour chaque machine connectée. Le tableau de bord SmartHub Connect est un outil puissant pour une gestion simplifiée et efficace du CSSD.

SmartHub Flow

SmartHub Flow est notre logiciel basé sur le web et prêt à l'emploi pour la traçabilité des sets et la localisation des instruments. Conçu pour répondre aux défis posés par la complexité croissante des CSSD, le logiciel fournit un outil de contrôle précis et sécurisé qui permet d'optimiser progressivement le flux de travail tout en maintenant des normes de productivité élevées. Les informations recueillies sur la production, l'expédition et la gestion des entrepôts permettent une analyse et une quantification précises des coûts, améliorant ainsi l'efficacité économique. Le logiciel est conforme aux normes de sécurité internationales telles que ISO 27001 et ISO 13485.

SmartHub Orbit

SmartHub Orbit est notre application web innovante qui transforme les données des machines en informations exploitables et en valeur ajoutée. Toutes les données pertinentes sur les équipements et les états des cycles sont accessibles depuis n'importe quel appareil, n'importe où et à n'importe quel moment. Les responsables de la CSSD ont ainsi un contrôle total et révolutionnent leur méthode de travail. SmartHub est conçu pour soutenir l'ensemble de l'équipe du CSSD grâce à des fonctionnalités et des mises à jour en constante évolution, telles que l'apprentissage en ligne, le dépannage, la numérisation des processus et les analyses avancées.

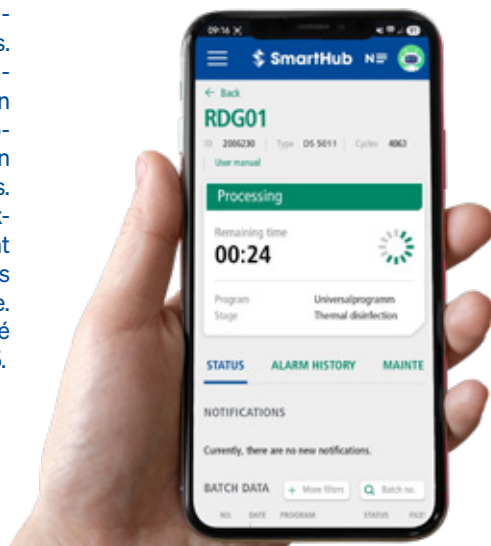

Qualité des processus

Un ensemble cohérent

Amélioration de la qualité des processus

Des performances de nettoyage optimales et fiables sont obtenues en combinant le PPC avec la rotation du bras de lavage et la surveillance de la pression du circuit, tout en mesurant la conductivité de l'eau pour détecter d'éventuels résidus de produits chimiques et de salissures.



Le système breveté Power Pulse Cleaning (PPC) de Steelco réduit ou élimine le prétraitement manuel des instruments creux complexes, garantissant ainsi la sécurité, la cohérence et l'efficacité.

Il utilise des impulsions d'air de qualité médicale pendant l'écoulement de l'eau pour créer des turbulences et améliorer le nettoyage à l'intérieur des lumen, des joints et des jonctions.



Pendant le séchage, les impulsions d'air éjectent l'eau résiduelle, améliorant ainsi les performances de séchage.

Nettoyage par impulsions



Le module PPC permet de connecter jusqu'à 11 instruments creux complexes.

Les principaux fabricants d'instruments chirurgicaux ont reconnu le système Steelco PPC comme une technologie efficace permettant d'éviter ou de réduire considérablement les phases de pré-nettoyage manuel de leurs instruments les plus critiques.

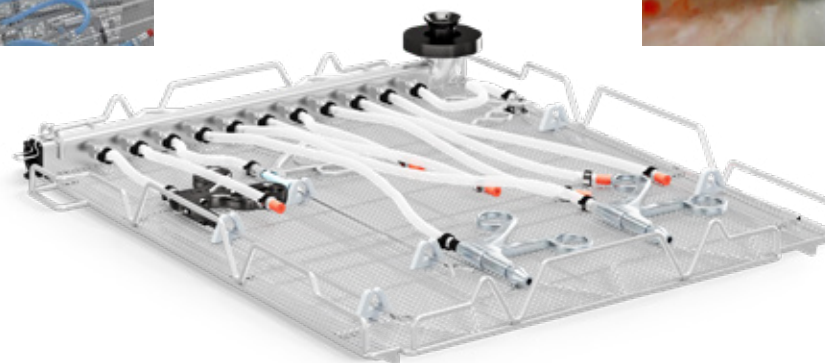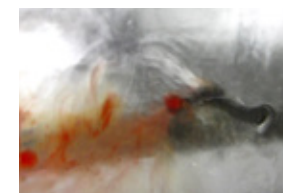

Filtration de haut niveau pour les modules de lavage

A 800 Filtre tubulaire pour le retraitement des instruments creux.
Filtre en maille d'acier inoxydable pour les unités mobiles, pour les particules $\geq 0,07$ mm.

Un seul filtre facile à nettoyer pour toutes les connexions de lumens.







Système de chargement flexible

Chariots de lavage, modules et connecteurs


Le système de chargement flexible permet de préparer les instruments dans des modules individuels et de faciliter le chargement des chariots, améliorant ainsi la sécurité et l'ergonomie.

Chariot de lavage C1802



Il s'agit de l'unité de base du système. Il peut être équipé de modules et de niveaux supplémentaires, comme indiqué ci-dessous. Les pages suivantes illustrent les configurations les plus courantes et présentent les configurations standard et les accessoires pour la connexion des instruments.

La configurabilité du chariot de lavage C1802 permet d'optimiser l'espace, généralement utilisé pour le stockage des chariots spécialisés, réduisant ainsi l'encombrement à l'intérieur des locaux.

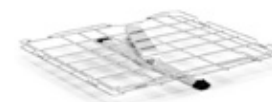

C1804 Niveau supplémentaire avec bras d'aspersion



C1809 Module de nettoyage Power Pulse pour 11 instruments MIS, longueur jusqu'à 500 mm / 19.68"



C1806 Module pour le retraitement des instruments MIS d'une longueur allant jusqu'à 480 mm / 18.90"



C1808 Module de retraitement des instruments ophtalmologiques d'une longueur maximale de 480 mm / 18.90". 18 connexions



C1805 Module de retraitement des instruments MIS d'une longueur maximale de 400 mm / 15.75"




C1816 Module pour le retraitement des instruments dentaires creux n° 22

Guide de configuration et exemples configurables

----- Niveau amovible avec bras de lavage

———— Niveau fixe avec bras de lavage

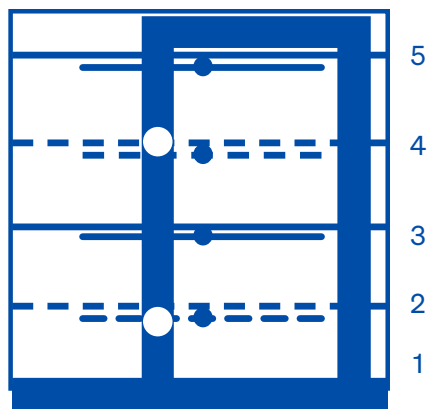

Combinaison possible de modules :

→ 1 x C1806* ou 2 x C1805

→ 1 x C1804 ou 1 x C1804 + 2 x C1805

→ 1 x C1806* ou 2 x C1805

→ 1 x C1804 ou 1 x C1804 + 2 x C1805

→ 1 x C1809 ou + 2 x C1805

* Non compatible en présence d'un niveau supérieur amovible



1 x C1809



2 x C1806



2 x C1805



45 connexions pour instruments creux



1 x C1804



1 x C1806



3 x C1805




29 connexions pour instruments creux
+ 4 plateaux DIN



2 x C1808



36 connexions pour instruments creux
+ 4 plateaux DIN

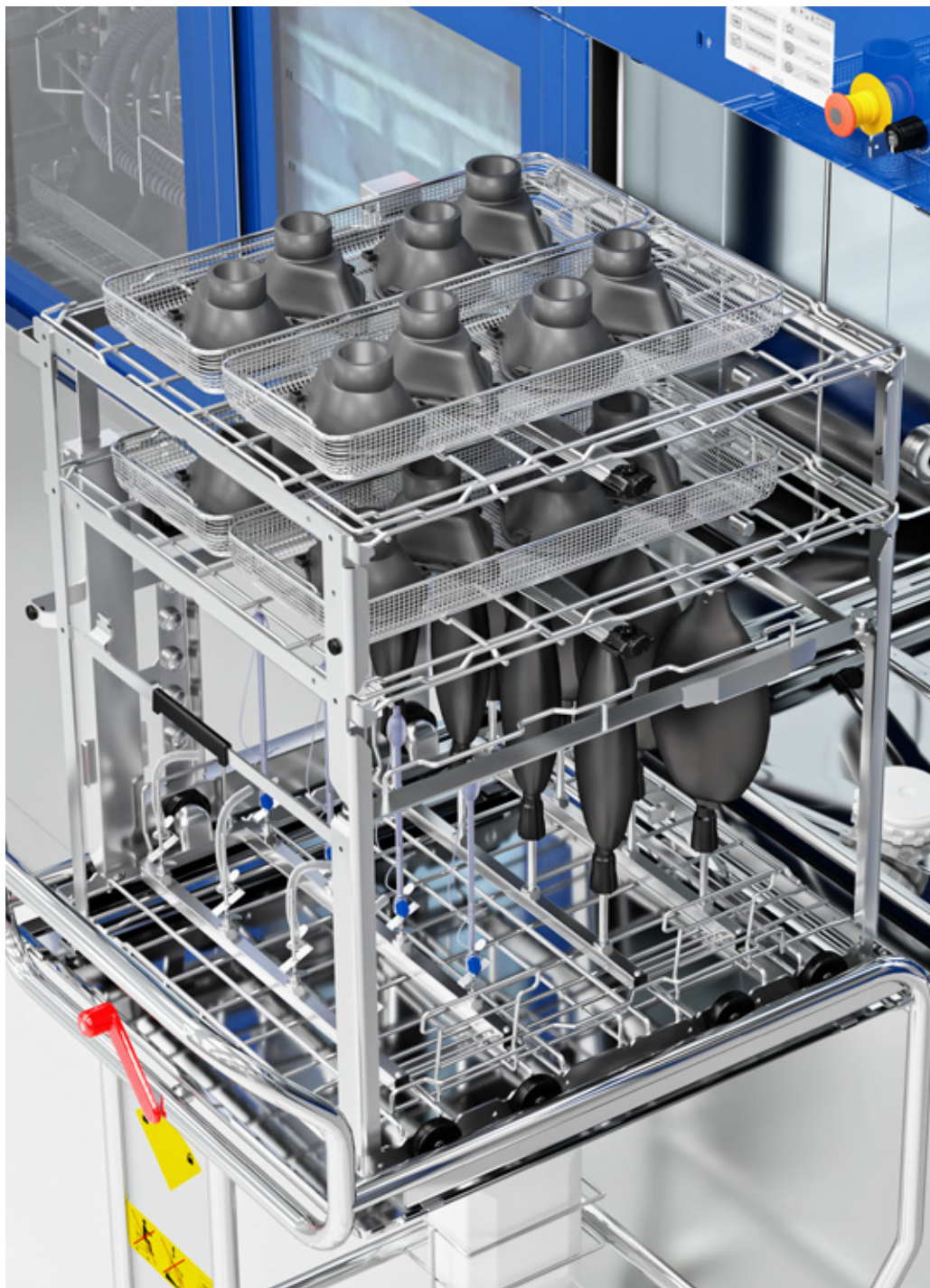

Système de chargement flexible

Chariots de lavage, modules et connecteurs

Le système de chargement flexible permet de préparer les instruments dans des modules individuels et de faciliter le chargement des chariots, améliorant ainsi la sécurité et l'ergonomie.

Chariot de lavage C1817



Le C1817 peut être équipé de modules et de niveaux supplémentaires comme indiqué ci-dessous.

Les pages suivantes illustrent les configurations les plus courantes et présentent les configurations standard et les accessoires pour la connexion des instruments.

La configurabilité de la servante de lavage C1817 permet d'optimiser l'espace, généralement utilisé pour le stockage des servantes spécialisées, réduisant ainsi l'encombrement à l'intérieur des locaux.



C1804 Niveau supplémentaire avec bras de pulvérisation




C1819 Module pour fraises orthopédiques



C1820 Module pour intubation et masques 8 positions



C1830 Panier à biberons 18 positions

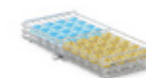

C1831 Plateau en maille avec couvercle pour biberons, tétines et anneaux 36 positions




C1821 Module pour matériel d'intubation 8 positions

Guide de configuration et exemples configurables

----- Niveau amovible avec bras de lavage

———— Niveau fixe avec bras de lavage

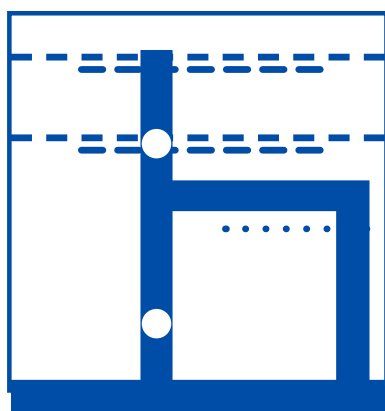

4

3

2

1



Combinaison possible de modules :

2 x C1830 ou
2 x C1819 ou
2 x C1820 ou

2 x C1830 ou
2 x C1819* ou
2 x C1821

1 x C1804

1 x C1804 ou
1 x C1804 + 2 x C1831

* Non compatible en présence d'un niveau supérieur amovible

Chariot de lavage pour instruments de chirurgie robotique

Steelco propose également des solutions de retraitement pour les instruments chirurgicaux robotiques d'autres marques avec des chariots de lavage dédiés ou modulaires. Demandez-nous les solutions de retraitement validées les plus récentes.

Chariot de lavage C1815

Chariot de lavage pour les instruments de chirurgie robotique et l'endoscope de la série daVinci Xi. Convient pour accueillir la caméra portable Summit Medical et les plateaux Single Scope 2.0 ou Single Scope Plus.



Les marques et logos daVinci sont des marques déposées d'Intuitive Surgical, Inc.



Chariots de lavage à niveau fixe

C1801

Chariot de lavage à 6 niveaux avec bras de lavage. Jusqu'à 12 plateaux DIN 1/1.

Espace utile :

Tous les niveaux ~ 60 mm / 2.3"



C1810

Chariot de lavage à 3 niveaux avec bras de lavage. Jusqu'à 6 plateaux DIN 1/1. Jusqu'à 3 plateaux SPRI I.

Espace utile :

Niveau 3 ~ 175 mm
Niveau 2 ~ 185 mm / 7.2"
Niveau 1 (inférieur) ~ 185 mm / 7.2"



C1812

Chariot de lavage à 5 niveaux avec bras de lavage. Jusqu'à 10 plateaux DIN 1/1. Jusqu'à 5 plateaux SPRI I.

Espace utile :

Tous les niveaux ~ 85 mm / 3.3"



C1811

Chariot de lavage à 4 niveaux avec bras de lavage. Jusqu'à 8 plateaux DIN 1/1.

Espace utile :

Niveau 4 ~ 100 mm
Niveaux 2 et 3 ~ 130 mm
Niveau 1 (inférieur) ~ 120 mm / 4.7"



C1814

Chariot de lavage à 2 niveaux avec bras de lavage. Dédié aux chaussures/ sabots de théâtre OP.

Espace utile :

Tous les niveaux ~ 300 mm / 11.8"



C1825

insert avec 30 supports pour chaussures/ sabots de bloc opératoire ou articles d'anesthésie.



C1826

insert avec 15 supports pour chaussures/ sabots de bloc opératoire ou articles d'anesthésie.



Chariots de lavage à niveaux amovibles

C1803

Chariot de lavage à 5 niveaux avec bras de lavage. Jusqu'à 10 plateaux DIN 1/1. Jusqu'à 5 plateaux SPRI I. Les niveaux sont amovibles.

Espace utile :

Sans 4 niveaux ~ 650 mm / 25.59"
Sans 3 niveaux ~ 450 mm / 17.71"
Sans 2 niveaux ~ 380 mm / 14.9"
Sans 1 niveau ~ 290 mm / 11.41"
Niveau 5 ~ 75 mm / 2.9"
Niveau 2,3,4 ~ 80 mm / 3.1"
Niveau 1 (inférieur) ~ 93 mm / 3.6"



C1842

support multi-usage pour bols, plateaux et cassettes, broches hautes.



C1841

Support multi-usages pour bols, plateaux et cassettes, picots bas.



C1828

insert avec 12 supports pour chaussures/ sabots de théâtre OP de grande taille.



Chariots de lavage spécialisés

C1813

Chariot de lavage MIS à 3 niveaux équipé de 2 bras de lavage.
longueur maximale de l'instrument :
~ 400 mm / 15.74"


Espace utile :

Niveau 3 ~ 412 mm / 16.22"
Niveau 2 ~ 63 mm / 2.48"
Niveau 1 (inférieur) ~ 400 mm / 15.74"



C1818

Chariot d'anesthésie équipé de :
- 12 supports pour tubes respiratoires
- 4 Embout d'injection pour ballon respiratoire
- 10 Embout d'injection pour matériel d'intubation
- 3 Support pour tuyaux respiratoires en silicone

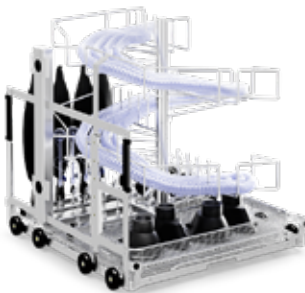

Chariot Flex pour articles encombrants

Le chariot de lavage à un niveau C1822 peut être équipé d'inserts dédiés pour tous les besoins de nettoyage de conteneurs DIN, de sabots d'hôpitaux, de plats rénaux.

C1822

Chariot de lavage à simple niveau pouvant être équipé d'inserts.

Hauteur utile : 672mm/26,45".



C1823

insert : jusqu'à 2 conteneurs DIN de 250 mm de haut avec couvercles.



C1842

insert : jusqu'à 3x conteneurs DIN de 150 mm de haut avec couvercles.



C1825

insert avec 30 supports pour chaussures/ sabots de bloc opératoire ou articles d'anesthésie.



C1826

insert avec 15 supports pour chaussures/ sabots de bloc opératoire ou articles d'anesthésie.




E 492

Insert pour jusqu'à 9 conteneurs réniformes, profondeur maximale de 50 mm.



Praticité et efficacité même dans les plus petits détails !

Les images ne représentent que quelques exemples de la conception avancée de nos accessoires.

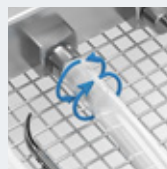

Système de tuyau pivotant anti-torsion pour faciliter la connexion des instruments et éviter les restrictions de débit d'eau.




Supports avec différents points de contact pour une couverture complète du lavage des instruments

Système de chargement flexible

C1802 Modules Composition

C1809

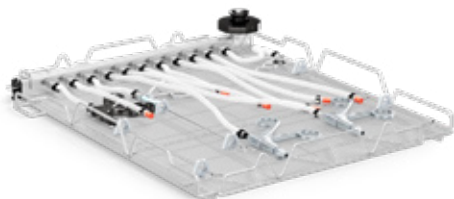


Dimensions totales

LxPxH:
530x600x91 mm /
20.86x23.62x3.58"

Espace utile :

A 500 mm
B 490 mm / 19.29"

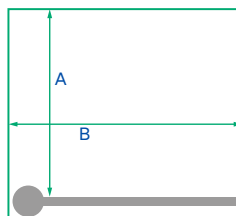

Articles fournis :

11 tuyaux en silicone avec raccords Luer Lock
50 x E 476, supports pour micro-instruments, Ø 4 à 8 mm, pour utilisation dans des plateaux grillagés avec une grille de 5 mm
50 x E 479, supports pour micro-instruments de Ø 4 mm, pour utilisation dans des plateaux grillagés avec une grille de 5 mm

C1805




Dimensions totales

LxPxH:
227x521x93 mm /
8.93x20.51x3.66"

Espace utile :

A 403 mm
B 215 mm / 8.46"

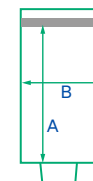

Articles fournis :

1 x A 855, tuyau en silicone avec adaptateur M Luer Lock pour F Luer Lock, longueur 160 mm
2 x E 362, bouchons aveugles
1 x E 447, adaptateurs F Luer Lock pour M Luer Lock
1 x E 449, adaptateurs M Luer Lock pour F Luer Lock
2 x E 452, buse d'injection, 60 mm de long, Ø 2.5 mm
1 x E 472, pince à ressort pour injecteurs Ø 4 mm
1 x E 453, buse d'injection avec pince de retenue, 100 mm de long, Ø 4 mm

C1806




Dimensions totales

LxPxH:
530x539x79 mm /
20.86x21.22x3.11"

Espace utile :

A 480 mm / 18.90"
B 383 mm / 15.08"
C 480 mm / 18.90"
D 470 mm / 18.50"

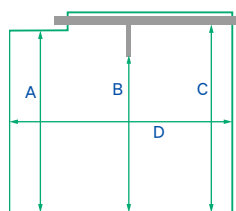

Articles fournis :

2 x A 856, tuyaux en silicone avec adaptateur M Luer Lock pour F Luer Lock, longueur 300 mm
1 x E 454 Ø 8,0mm buse d'injection, jets radiaux, H. 152 mm
2 x E 456 Support à ressort pour maintenir les instruments MIS ouverts
1 x E 464 Support pour E 454 buses d'injection Ø 13 x 65 mm
1 x E 336, manchon d'irrigation, longueur 121 mm, Ø 11 mm, 2 x E 362, bouchons aveugles
6 x E 442 manchons d'irrigation pour instruments Ø 4 - 8 mm, 121 mm de long, Ø 11 mm, bouchon avec ouverture Ø 6 mm
1 x E 443, manchon pour instruments Ø 8 - 8.5 mm, longueur 121 mm, Ø 11 mm, bouchon avec ouverture Ø 10 mm

C1808




Dimensions totales

LxPxH:
530x539x79 mm /
20.86x21.22x3.11"

Espace utile :

A 477 mm
B 480 mm / 18.90"
C 468 mm / 18.42"
D 236 mm / 9.29"
E 203 mm

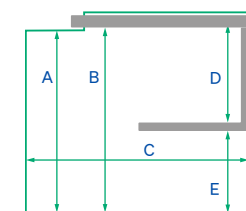

Articles fournis :

2 x A 856, tuyaux en silicone avec adaptateur M Luer Lock pour F Luer Lock, longueur 300 mm
10 x A 855, tuyaux en silicone avec adaptateur M Luer Lock pour F Luer Lock, longueur 160 mm
1 x E 362, bouchons aveugles, 3 x E 449, adaptateurs M Luer-Lock pour F Luer-Lock
1 x E 452, buse d'injection, 60 mm de long, Ø 2.5 mm, 1 x A 800, filtre tubulaire réutilisable, longueur 405 mm, Ø 22.5 mm
11 x E 447, adaptateurs F Luer-Lock pour M Luer Lock, 11 x E 517, adaptateurs M Luer-Lock pour F Luer Lock
10 x E 476, supports pour micro-instruments, Ø 4 à 8 mm, pour utilisation dans des plateaux à mailles avec grille de 5 mm
10 x E 477, supports pour micro-instruments, pour utilisation dans des plateaux à mailles avec grille de 5 mm

Système de chargement flexible

Composition des modules C1817

C1816



Dimensions globales

LxPxH :
189x523x85 mm /
7.44x20.59x3.34"

Articles fournis :

22 x A 803, supports pour
contre-angles dentaires,
pièces à main et turbines

C1819



Dimensions globales

LxPxH :
245x518x239 mm /
9.64x20.39x9.40"

Articles fournis :

6 douilles d'extension
pour fraises à moelle
osseuse

C1820



Dimensions totales

LxPxH :
143x518x352 mm /
5.62x20.39x13.85"

Articles fournis :

8 x E 466 buses d'injec-
tion pour ballon respira-
toire

C1821



Dimensions totales

LxPxH :
149x518x143 mm /
5.86x20.39x5.62"

Éléments fournis :

8 x A 833 buses d'injec-
tion

Accessoires en option

															
A 800															
A 803															
A 813															
A 814															
A 816															
A 854															
A 855															
A 856															
E 362															
E 476															
E 477															
E 479															
E 499															
E 790															
E 791															
C1805															
C1806															
C1808															
C1809															
C1816															

Servantes de transfert et automates de chargement

Conçu pour répondre aux besoins des cliniques et des centres de stérilisation de taille moyenne, le DS 610 G2 présente une gamme complète de solutions pour la manipulation des servantes de lavage, avec des détails visant à améliorer l'ergonomie d'utilisation. En outre, le système comprend des trappes à double porte, des fenêtres et des convoyeurs tampons pour le retour des casiers de lavage.

T647
servante de transfert réglable en hauteur



T641
servante de transfert à hauteur fixe



PT 2P G2 610G2
Trappe à double porte



PT 1P G2 610G2
Porte simple



Capacité et dimensions Aménagements et configurations

Modèle	Hauteur	Chambre (HxDxL)			Encombrement (HxDxL)		
		Profondeur	Largeur		Hauteur	Profondeur	Largeur
DS 610 G2 (une porte)	728 mm	610 mm	570 mm		1940/2395* mm	700 mm	650 mm
DS 610 G2 (deux portes)	728 mm	610 mm	570 mm		1940/2395* mm	700 mm	650 mm
DS 610 SL G2 (une porte)	728 mm	615 mm	570 mm		1940/2395* mm	700 mm	650 mm
DS 610 SL G2 (deux portes)	728 mm	615 mm	570 mm		1940/2395* mm	700 mm	650 mm

Hauteur de chargement : 850 mm au-dessus du sol fini.

(*) La hauteur totale de l'appareil dépend de la présence d'un condenseur à vapeur, de son type et de sa combinaison avec d'autres options.

Des performances maximisées avec les experts de SteelcoBelimed

Plans de service

Mieux vaut prévenir que guérir. Nos plans de service sur mesure garantissent une disponibilité maximale de l'équipement grâce à une maintenance préventive personnalisée en fonction de l'utilisation de la machine. Que vous fassiez appel à vos propres techniciens ou à notre équipe d'experts, différentes solutions peuvent inclure des visites préventives programmées, des réparations et des pièces détachées, selon les options choisies. Des services additionnels, tels que le nettoyage de la chambre et la surveillance de la qualité de l'eau, permettent d'optimiser les performances et de maîtriser les coûts, afin que vos opérations se déroulent de manière fluide et efficace.

Renseignez-vous auprès de votre représentant SteelcoBelimed local pour connaître la gamme de services proposés dans votre région.

Académie

L'Académie SteelcoBelimed propose une gamme variée de formations adaptées aux besoins spécifiques des professionnels des services de stérilisation. Le centre de formation de pointe situé à Riese, en Italie, dessert pour SteelcoBelimed les divisions Contrôle des infections, Laboratoire et Recherche biomédicale (BMR), avec une capacité impressionnante de formation pouvant accueillir jusqu'à 1100 techniciens par an. L'Académie incarne notre engagement à faire progresser l'ensemble du domaine du traitement stérile. Les professionnels de santé qui suivent une formation ici acquièrent des connaissances qui vont au-delà du fonctionnement des équipements pour englober la prévention des infections et l'optimisation des processus de stérilisation. Ces connaissances se traduisent directement par une amélioration de la sécurité des patients et de l'efficacité opérationnelle dans leurs établissements.

Contrats TCO

Nos contrats TCO (Total Cost of Ownership) offrent une solution pluriannuelle de service à coût fixe qui garantit la stabilité budgétaire et une valeur à long terme. En fixant les tarifs et en minimisant l'exposition à la hausse des coûts, ces contrats permettent une planification financière claire. Idéaux pour prolonger la durée de vie de votre équipement, ces forfaits tout compris réduisent les coûts d'exploitation, protègent les investissements et soutiennent les objectifs de durabilité tout au long du cycle de vie de l'équipement.

Digitalisation

Nos solutions digitales donnent accès à des données en temps réel sur les équipements, aidant ainsi les équipes de maintenance à surveiller les performances et à identifier plus rapidement tout problème potentiel. Des tableaux de bord clairs et des alertes automatisées permettent une maintenance prédictive et plus efficace. Ces outils favorisent une meilleure planification, réduisent les temps d'arrêt imprévus et simplifient la mise en conformité. En intégrant des flux de travail numériques dans les routines de maintenance, les établissements peuvent améliorer la fiabilité et prendre des décisions plus éclairées basées sur l'utilisation réelle et les tendances de performance.

SteelcoBelimed  Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-01-Steelco DS 610 G2 FR Rev05.pdf

Les produits proposés à la vente peuvent différer de ceux décrits ou illustrés dans cette brochure en raison de modifications ultérieures de la production et/ou de configurations optionnelles.

Les produits et les spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur Steelco pour obtenir les informations les plus récentes.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com



* Seulement pour les produits listés
dans le certificat 065/MDR