

Serie DS 610 G2

Lavastrumenti a termodisinfezione con capacità di 12 cestini DIN



Steelco

Miele

Group Member

Produttore e fornitore globale di soluzioni per il lavaggio e la sterilizzazione

Nata dall'unione di Steelco e Belimed, SteelcoBelimed è pioniera nelle soluzioni per i flussi sterili, con innovazione, affidabilità e attenzione al cliente. "Innovate with confidence" esprime il nostro impegno per prodotti e servizi di alta qualità, stabilendo nuovi standard nel settore del Controllo delle Infezioni e delle Scienze della Vita.

Il cliente al centro

Il nostro impegno è comprendere pienamente le esigenze e la soddisfazione dei clienti. I nostri prodotti e servizi sono progettati per rispondere a queste necessità specifiche, assicurando che ogni decisione che prendiamo porti benefici ai clienti per ottenere i migliori risultati.

Innovazione

La nostra dedizione al progresso ci spinge a cercare e abbracciare costantemente nuove idee, tecnologie e metodi. Questo impegno garantisce che i nostri prodotti e servizi evolvano e migliorino continuamente.

Sostenibilità

Il nostro pianeta, la nostra responsabilità. In SteelcoBelimed, la sostenibilità è parte integrante di tutto ciò che facciamo: dall'ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione dei consumi energetici alla creazione di prodotti che favoriscono la tutela ambientale. Per noi, proteggere il futuro significa agire oggi. Con integrità, determinazione e profondo rispetto per le persone e per il pianeta.

Affidabilità

Il nostro impegno è raggiungere i più alti livelli di produttività attraverso l'ottimizzazione di processi, risorse e operazioni. Fornendo costantemente soluzioni affidabili, garantiamo la creazione di valore riducendo al minimo le inefficienze. Il nostro obiettivo è instaurare relazioni durature basate su fiducia, integrità e rispetto reciproco, adempiendo con affidabilità ai nostri impegni.

DS 610 G2

Termodisinfettori

DS 610 G2 offre soluzioni flessibili e ad alta efficienza per cliniche e centri di sterilizzazione. Progettato per ridurre l'uso di acqua ed energia, supporta un'elevata produttività e può ridurre il consumo di risorse di oltre il 50%.

Fornisce un trattamento completo: lavaggio, disinfezione termica ed asciugatura con filtro HEPA 14. Una pompa a velocità variabile ottimizza la pressione e l'uso dell'acqua in base al carico e alla fase del ciclo. Le nostre lavastrumenti garantiscono sicurezza, qualità, tracciabilità e bassi costi operativi.



DS 610 G2

Porta/e manuale/i singola/e o passante/i
Capacità 12 cestini DIN
volume della camera 255 litri

DS 610 SL G2

Porta/e automatica/e a scorrimento singola/e o passante/i
capacità 12 cestini DIN
volume della camera 255 litri



Vantaggi chiave

una combinazione vincente

Efficienza eco-compatibile

Le lavastrumenti Steelco sono progettate per offrire le migliori soluzioni per ridurre il consumo di energia e di acqua, garantendo agli utenti i più bassi costi operativi per carico.

Qualità del processo

Steelco e Miele R&D lavorano insieme per sviluppare soluzioni innovative in grado di migliorare l'efficienza del ciclo e la sicurezza, riducendo al contempo i tempi di processo e il consumo di energia.

Flessibilità, controllo e connettività

Il display touch a colori di alta qualità, in combinazione con la connessione Wi-Fi ed Ethernet, garantisce un'interazione intuitiva con l'operatore e un controllo eccellente dell'intero processo.

Inoltre, SmartHub Flow consente di visualizzare da remoto le prestazioni del dispositivo in tempo reale e quelle storiche.

Velocità di processo ottimizzata

Il nostro obiettivo è fornire ai clienti i processi di lavaggio e disinfezione più rapidi possibili, in conformità con gli standard internazionali e locali.

Verificate le opzioni di DS 610 G2 per risparmiare tempo ed energia.

Flessibilità Sistema di caricamento

Massima flessibilità unita a un utilizzo intuitivo. Il sistema modulare di rack di lavaggio offre specializzazione ed elevata flessibilità nel caricamento della lavastrumenti.

Opzioni di carico multiple

Una gamma completa di carrelli di trasferimento, rulliere e finestre di passaggio completano il sistema per ottimizzare il flusso di lavoro.

Facile installazione Plug & Play

Nonostante la capacità di 12 DIN, il DS 610 G2 è compatto e plug-and-play e richiede solo alimentazione, acqua e scarico.

È progettato per passare attraverso porte e ascensori, con uno zoccolo su ruote per un facile posizionamento. Ideale per cliniche e CSSD di medie dimensioni, il modello con porta scorrevole supporta il carico e lo scarico automatizzato.



Efficienza e sostenibilità Insieme

Accelerare il ciclo risparmiando tempo ed energia

Grazie alla disponibilità della tanica preriscaldato dell'opzione Fast Cycle, è possibile risparmiare tempo e avere a disposizione articoli rilavorati in tempi più brevi senza diminuire la qualità del processo. Il tempo di riscaldamento della fase finale di risciacquo può essere ridotto dell'80% in condizioni di utilizzo medio.



Lavaggio principale

massime prestazioni di lavaggio con una pulizia accurata e veloce.

Fase di risciacquo

prestazioni di risciacquo sicure con un consumo d'acqua ridotto.

Livelli di efficienza ineguagliabili, riduzione del consumo di energia e di acqua con i più bassi costi operativi per carico.

La pompa a velocità variabile consente di regolare la pressione di circolazione (massime prestazioni quando necessario) e il consumo di acqua (risparmio idrico quando possibile). Le prestazioni di lavaggio sono quindi sempre ottimali e possono essere monitorate con precisione.

Asciugatura forzata e ad aria filtrata

L'asciugatura forzata e ad aria calda consente di ottenere carichi perfettamente asciutti. Un filtro HEPA H14 assicura risultati privi di contaminazione. Il sensore di umidità opzionale garantisce un'asciugatura efficiente con il minimo dispendio di tempo ed energia.

Materiali di alta qualità, dispositivi destinati a durare nel tempo

Camera, giranti di lavaggio e filtri del pozzetto sono realizzati in acciaio inox AISI 316 L di alta qualità, elettrolucidato; una garanzia di pulizia, affidabilità a lungo termine e facile riciclaggio del prodotto a fine vita.

Il telaio strutturale del DS 610 G2 è realizzato in acciaio inox di alta qualità per garantire una maggiore durata.




Riepilogo delle opzioni di efficienza e sostenibilità

- Power Pulse Cleaning
- Serbatoio di preriscaldamento
- Asciugatura dinamica
- Condensatore di vapore



DS 610 G2

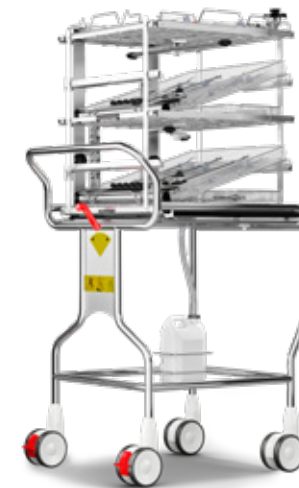

DS 610 SL G2

Flessibilità nelle opzioni post-vendita

Steelco offre kit di retrofit per i dispositivi esistenti per adattarli alle esigenze:

- Sensore di conducibilità per la migliore qualità dei risultati del risciacquo finale
- Pompa di scarico per posizioni scomode o remote
- Fase di asciugatura controllata da un sensore di umidità
- ... e molto altro ancora



Requisiti di assistenza ridotti al minimo

Manutenzione estremamente semplificata ed economica.
Accesso frontale a tutti i componenti. Le unità sono dotate di ruote per un posizionamento facile e veloce e di piedi fissi.

Qualità del processo Insieme

Grazie all'ingombro ridotto, l'elevata capacità della serie DS 610 G2 non incide sullo spazio del reparto.

L'installazione "plug and play" è semplificata e richiede solo collegamenti flessibili alla rete elettrica, all'ingresso e allo scarico dell'acqua.

Flessibilità di configurazione

A seconda delle utenze disponibili, Steelco DS 610 G2 e DS 610 SL G2 possono essere configurati per:

- riscaldamento elettrico
- riscaldamento a vapore esterno indiretto che riduce il fabbisogno complessivo di energia elettrica
- riscaldamento misto che consente di passare dal vapore al riscaldamento elettrico come soluzione di riserva.

Un addolcitore d'acqua incorporato è disponibile come opzione e può essere integrato in caso di scarsa qualità dell'acqua in entrata o di reparti affollati con acqua trattata esternamente.

La lavastrumenti è adatta per installazioni ventilate o non ventilate con opzioni di condensazione del vapore.

Pronta all'uso!

Lo stato del dispositivo e, quindi, la disponibilità della lavastrumenti sono chiaramente indicati dal cambiamento di colore della luce della camera. Bianco: ciclo in corso - Verde: processo completato OK - Rosso: allarme attivo





Flessibilità e controllo Insieme

L'ampio pannello di controllo touchscreen da 7" (su entrambi i lati per i dispositivi a doppia porta) facilita il controllo del dispositivo con informazioni luminose e di facile lettura anche a distanza: un aiuto intuitivo e pratico per gli operatori nelle loro attività quotidiane. Inoltre, il design ben studiato e facile da usare è coerente in tutta la gamma dei nostri dispositivi, a supporto di un funzionamento intuitivo e di processi affidabili.

Un'interfaccia facile da usare


L'ampio pannello di controllo touch screen da 7" facilita il controllo del dispositivo con informazioni luminose e di facile lettura anche a distanza. Gli operatori sono assistiti in ogni fase con comandi chiari e intuitivi.

Modalità di assistenza tecnica

Le lavastumenti sono progettate per semplificare la manutenzione. Un pannello sinottico di facile lettura consente di avere una panoramica approfondita dello stato della macchina e dei componenti, velocizzando gli interventi di assistenza.

Controllo delle prestazioni di lavaggio e della qualità del risciacquo finale

L'HMI visualizza i parametri di pressione di lavaggio e di conducibilità dell'acqua durante le fasi di processo rilevanti.

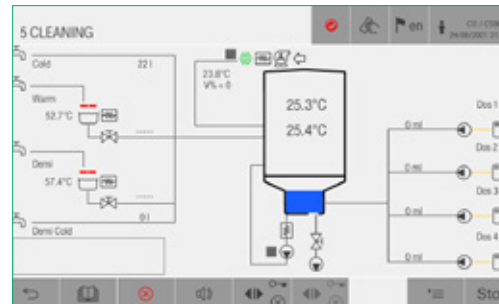


Pannello sinottico di facile lettura

Livelli di accesso per gli utenti

Cinque livelli di accesso assicurano che solo il personale addestrato abbia accesso a funzioni specifiche: operatore, responsabile di reparto, tecnico di assistenza presso il cliente, tecnico di assistenza autorizzato e produttore.

Memorizzazione dei dati del ciclo

I dati dei cicli sono memorizzati e disponibili dalla stampante integrata opzionale e, se il dispositivo è collegato alla rete, i dati possono essere inviati a un sistema di tracciabilità centralizzato.

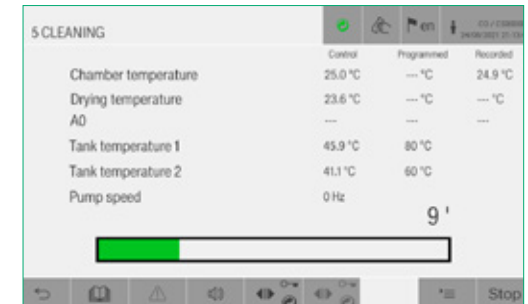

Stato dei cicli e messaggi di allarme ben visibili.

Soluzione di digitalizzazione

Software di gestione e tracciamento

Garantisce la disponibilità di strumenti nel posto giusto al momento giusto, ricondizionati secondo gli standard corretti nel più breve tempo possibile e al minor costo possibile.

SmartHub Connect


SmartHub Connect è una soluzione software on-premise che raccoglie i dati dalle apparecchiature compatibili e li invia a un sistema di tracciamento degli strumenti. Gli utenti ottengono la massima trasparenza grazie a un cruscotto visivo che visualizza lo stato dei programmi e dei cicli per ogni macchina collegata. Il cruscotto SmartHub Connect è un potente strumento per una gestione semplificata ed efficiente dei CSSD.

Flusso SmartHub

SmartHub Flow è il nostro software basato sul web e pronto per il cloud per la tracciabilità dei set e la localizzazione degli strumenti. Progettato per affrontare le sfide della crescente complessità dei CSSD, il software fornisce uno strumento di monitoraggio preciso e sicuro che consente di ottimizzare progressivamente il flusso di lavoro mantenendo elevati standard di produttività. Le informazioni raccolte sulla produzione, la spedizione e la gestione del magazzino consentono un'accurata analisi e quantificazione dei costi, migliorando l'efficienza economica. Il software è conforme agli standard di sicurezza internazionali come ISO 27001 e ISO 13485.

SmartHub Orbit

SmartHub Orbit è la nostra innovativa applicazione basata sul web che trasforma i dati delle macchine in informazioni utili e valore aggiunto. Tutti i dati delle apparecchiature e gli stati dei cicli sono accessibili da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento. In questo modo i responsabili dei CSSD hanno il pieno controllo e rivoluzionano il loro modo di lavorare. SmartHub è progettato per supportare l'intero team CSSD con funzionalità e aggiornamenti in continua evoluzione, come l'e-learning, la risoluzione dei problemi, la digitalizzazione dei processi e le analisi avanzate.

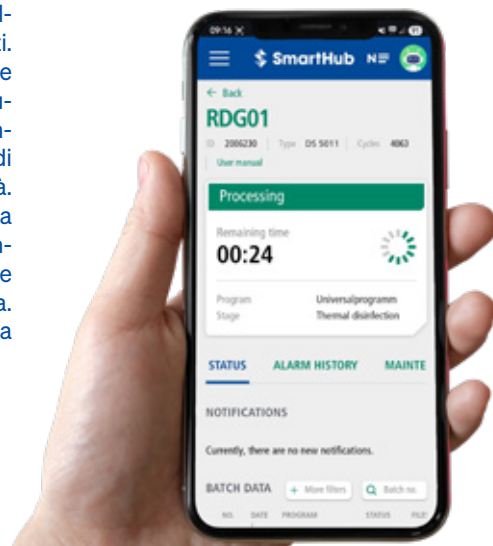

Qualità del processo Insieme

Qualità di processo migliorata

Le prestazioni di pulizia ottimali e affidabili si ottengono combinando il PPC con la rotazione della girante di lavaggio e il monitoraggio della pressione del circuito, misurando al contempo la conducibilità dell'acqua per rilevare eventuali residui chimici e di sporco.



Il sistema brevettato Power Pulse Cleaning (PPC) di Steelco riduce o elimina il pretrattamento manuale di strumenti cavi complessi, garantendo sicurezza, coerenza ed efficienza.

Utilizza impulsi di aria medica durante il flusso dell'acqua per creare turbolenza e migliorare la pulizia all'interno di lumi, giunti e giunzioni.




Durante l'asciugatura, gli impulsi d'aria espellono l'acqua residua, migliorando le prestazioni di asciugatura.

Power Pulse Cleaning



Il modulo PPC consente di collegare fino a 11 strumenti cavi complessi.

I principali produttori di strumenti chirurgici hanno riconosciuto che il sistema PPC di Steelco è una tecnologia efficace che consente di saltare o ridurre notevolmente le fasi di prelavaggio manuale degli strumenti più critici.

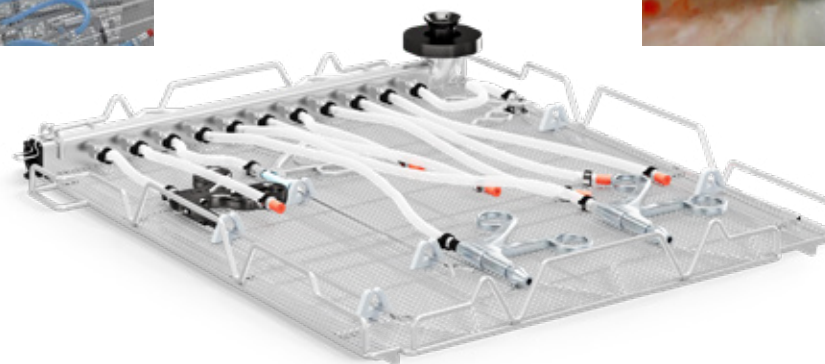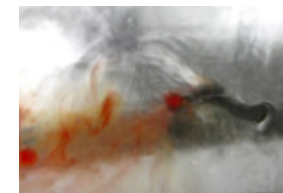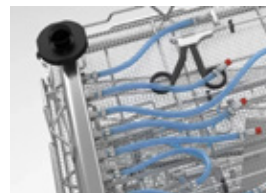

Filtrazione di alto livello per i moduli wash rack

A 800 Filtro tubolare per il ritrattamento di strumenti cavi.

Filtro in rete di acciaio inossidabile per unità mobili, per particelle $\geq 0,07$ mm.

Un unico filtro facile da pulire per tutte le connessioni dei lumi.







Flexible Loading System

Carrelli di lavaggio, moduli e connettori

Il sistema di caricamento flessibile consente di preparare gli strumenti in moduli singoli e di facilitare il caricamento dei carrelli, migliorando la sicurezza e l'ergonomia.

Carrello di lavaggio C1802



È l'unità di base del sistema. Può essere equipaggiato con moduli e livelli aggiuntivi, come illustrato di seguito. Le pagine seguenti illustrano le configurazioni più comuni e introducono le configurazioni standard e gli accessori per il collegamento degli strumenti.

La configurabilità del carrello di lavaggio C1802 porta a un ulteriore vantaggio di ottimizzazione degli spazi, solitamente impiegati per lo stoccaggio del carrello specializzato, riducendo l'ingombro all'interno degli ambienti.



C1804 Livello aggiuntivo con girante di lavaggio



C1809 Modulo per la pulizia Power Pulse per 11 strumenti MIS, lunghezza fino a 500 mm / 19,68".



C1806 Modulo per il ritrattamento di strumenti MIS con lunghezza fino a 480 mm (18,90")



C1808 Modulo per il ritrattamento di strumenti oftalmologici con lunghezza fino a 480 mm / 18,90". 18 connessioni




C1805 Modulo per il ricondizionamento di strumenti MIS con lunghezza fino a 400 mm (15,75")



C1816 Modulo per il ricondizionamento di strumenti dentali cavi nr. 22

Guida alla configurazione ed esempi configurabili

- Livello rimovibile con girante di lavaggio
- Livello fisso con braccio di lavaggio

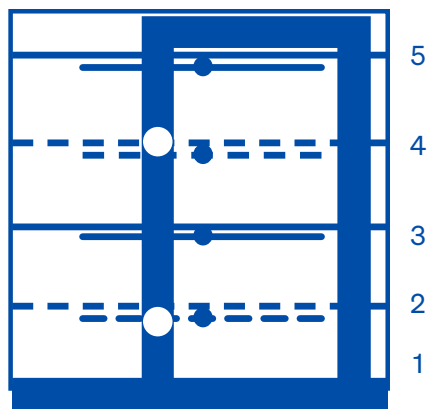

Possibile combinazione di moduli:

- 1 x C1806* o 2 x C1805
- 1 x C1804 o 1 x C1804 + 2 x C1805
- 1 x C1806* o 2 x C1805
- 1 x C1804 o 1 x C1804 + 2 x C1805
- 1 x C1809 o + 2 x C1805

* Non compatibile in presenza di un livello superiore rimovibile



1 x C1809



2 x C1806



2 x C1805



45 connessioni per strumenti
cavi



1 x C1804



1 x C1806



3 x C1805




29 connessioni per strumenti
cavi
+ 4 cestini DIN



2 x C1808



36 connessioni per strumenti
cavi
+ 4 cestini DIN

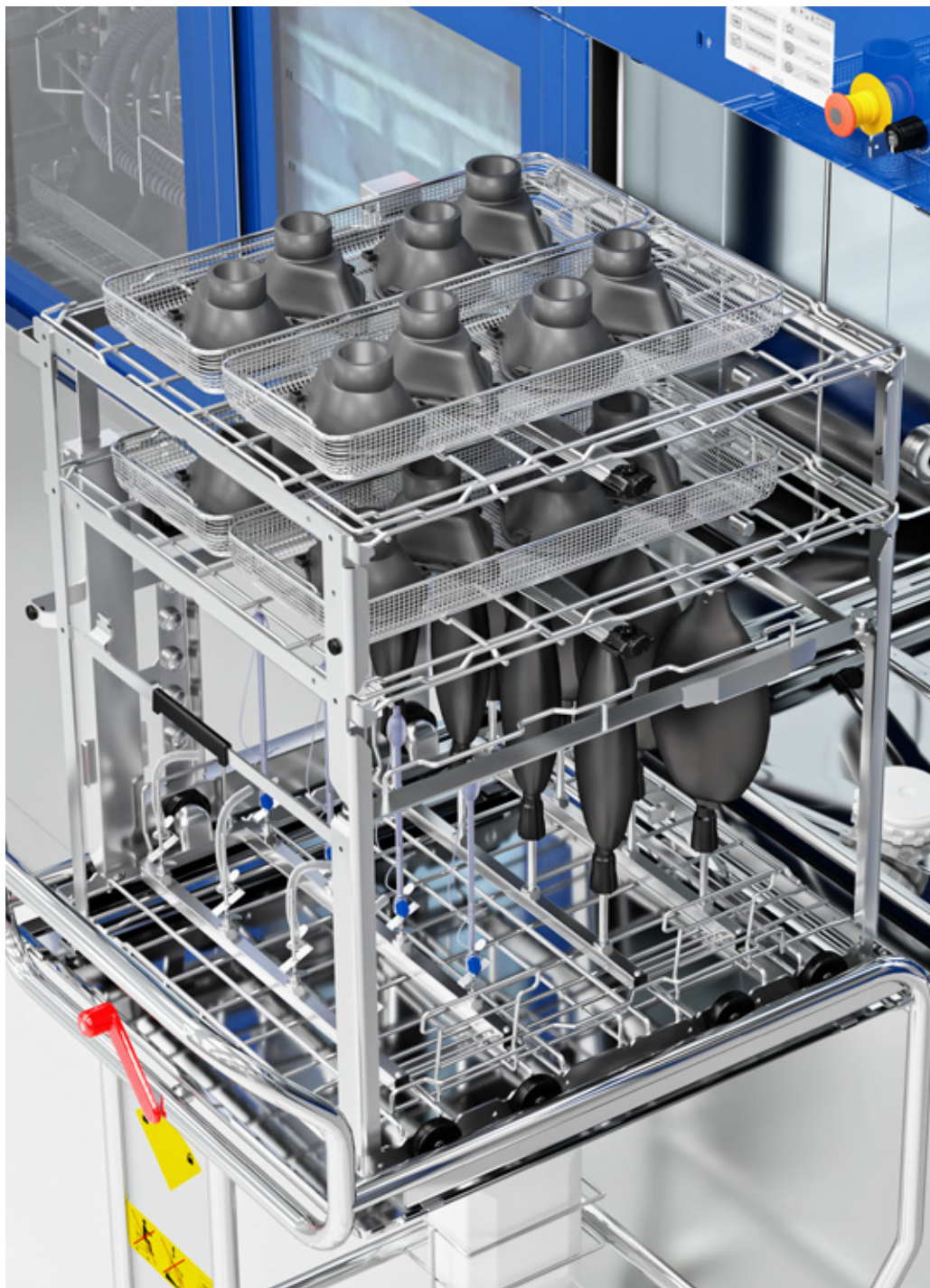

Flexible Loading System

Carrelli di lavaggio, moduli e connettori

Il sistema di caricamento flessibile consente di preparare gli strumenti in moduli singoli e di facilitare il caricamento dei carrelli, migliorando la sicurezza e l'ergonomia.

Carrello di lavaggio C1817



Il C1817 può essere dotato di moduli e livelli aggiuntivi, come illustrato di seguito.

Le pagine seguenti illustrano le configurazioni più comuni e introducono le configurazioni standard e gli accessori per il collegamento degli strumenti.

La configurabilità del carrello di lavaggio C1817 porta a un ulteriore vantaggio di ottimizzazione degli spazi, solitamente utilizzato per lo stoccaggio dei carrelli specialistici, riducendo l'ingombro all'interno degli ambienti.



C1804 Livello aggiuntivo con girante di lavaggio



C1819
Modulo per punte di trapani ortopedici



C1820
Modulo per intubazione e maschere 8 posizioni



C1830
Cestino per biberon 18 posizioni



C1831
Vassoio in rete con coperchio per ciucci e anelli per biberon 36 posizioni




C1821
Modulo per materiale da intubazione 8 posizioni

Guida alla configurazione ed esempi configurabili

----- Livello rimovibile con girante di lavaggio

———— Livello fisso con braccio di lavaggio

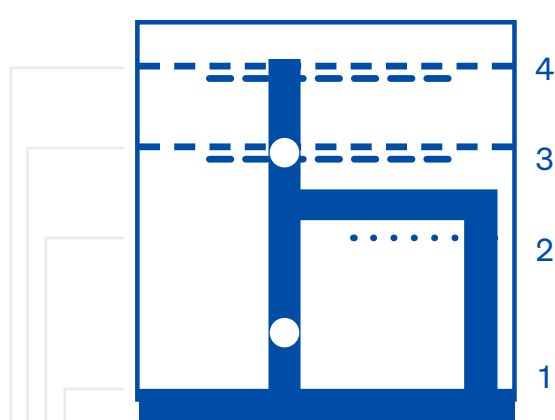

Possibile combinazione di moduli:

2 x C1830 o
2 x C1819 o
2 x C1820 o

2 x C1830 o
2 x C1819* o
2 x C1821

1 x C1804

1 x C1804 o
1 x C1804 + 2 x C1831

* Non compatibile in presenza di un livello superiore rimovibile

Carrello di lavaggio per strumenti di chirurgia robotica

Steelco offre soluzioni di ricondizionamento anche per strumenti chirurgici robotici di altre marche con carrelli di lavaggio dedicati o modulari. Chiedeteci le soluzioni di ritrattamento più aggiornate e convalidate.

Carrello di lavaggio C1815

Carrello di lavaggio per strumenti di chirurgia robotica ed endoscopio della serie daVinci Xi. Adatto per ospitare la telecamera portatile Summit Medical e i cestini Single Scope 2.0 o Single Scope Plus.



I marchi e i loghi daVinci sono marchi registrati di Intuitive Surgical, Inc.



Carrelli di lavaggio a livelli fissi

C1801

Carrello di lavaggio a 6 livelli con bracci di lavaggio.
Fino a 12 cestini DIN 1/1.

Spazio utile:

Tutti i livelli ~ 60 mm / 2,3"



C1810

Carrello di lavaggio a 3 livelli con bracci di lavaggio.
Fino a 6 cestini DIN 1/1
Fino a 3 cestini SPRI I.

Spazio utile:

Livello 3 ~ 175 mm / 6,8"
Livello 2 ~ 185 mm / 7,2"
Livello 1 (inferiore) ~ 185 mm / 7,2"



C1812

Carrello di lavaggio a 5 livelli con bracci di lavaggio.
Fino a 10 cestini DIN 1/1.
Fino a 5 cestini SPRI I.

Spazio utile:

Tutti i livelli ~ 85 mm / 3,3"



C1811

Carrello di lavaggio a 4 livelli con bracci di lavaggio.
Fino a 8 cestini DIN 1/1.

Spazio utile:

Livello 4 ~ 100 mm / 3,9"
Livello 2 e 3 ~ 130 mm / 5,1"
Livello 1 (inferiore) ~ 120 mm / 4,7"



C1814

Carrello di lavaggio a 2 livelli con bracci di lavaggio.
Per scarpe/zoccoli da sala operatoria.

Spazio utile:

Tutti i livelli ~ 300 mm / 11,8"



C1825

inserto con 30 supporti per scarpe/zoccoli da sala operatoria o articoli per anestesia.



C1826

inserto con 15 supporti per scarpe/zoccoli da sala operatoria o articoli per anestesia.



Carrelli di lavaggio a livelli rimovibili

C1803

Carrello di lavaggio a 5 livelli con bracci di lavaggio.
Fino a 10 cestini DIN 1/1.
Fino a 5 cestini SPRI I.
I livelli sono rimovibili.

Spazio utile:

Senza 4 livelli ~ 650 mm / 25,59"
Senza 3 livelli ~ 450 mm / 17,71"
Senza 2 livelli ~ 380 mm / 14,9"
Senza 1 livello ~ 290 mm / 11,41"
Livello 5 ~ 75 mm / 2,9"
Livello 2,3,4 ~ 80 mm / 3,1"
Livello 1 (inferiore) ~ 93 mm / 3,6"



C1842

supporto multiuso per bacinelle, cestini e cassette, perni alti.



C1841

supporto multiuso per bacinelle, cestini e cassette, perni bassi.



C1828

inserto con 12 supporti per scarpe/zoccoli da teatro OP di grandi dimensioni.



Carrelli di lavaggio specializzati

C1813

Carrello di lavaggio MIS a 3 livelli con 2 bracci di lavaggio. lunghezza massima dello strumento: ~ 400 mm / 15,74"

Spazio utile:

Livello 3 ~ 412 mm / 16,22"

Livello 2 ~ 63 mm / 2,48"


Livello 1 (inferiore) ~ 400 mm / 15,74"



C1818

Carrello di lavaggio per anestesia dotato di:

- 12 supporti per tubi di respirazione
- 4 iniettori per sacca di respirazione
- 10 iniettori per materiali di intubazione
- 3 Supporto per tubi di respirazione in silicone

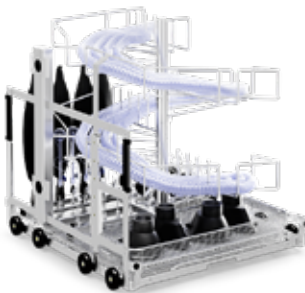

Carrello per articoli ingombranti

Il carrello di lavaggio a livello singolo C1822 può essere dotato di inserti dedicati per qualsiasi esigenza di pulizia di contenitori DIN, zoccoli ospedalieri, piatti reniformi.

C1822

Carrello di lavaggio a livello singolo adatto per inserti.

Altezza utile: 672 mm/26,45".



C1823

inserto: fino a 2 contenitori DIN alti 250 mm con coperchio.



C1842

inserto: fino a 3 contenitori DIN da 150 mm di altezza con coperchio.



C1825

inserto con 30 supporti per scarpe/zoccoli da sala operatoria o articoli per anestesia.



C1826

inserto con 15 supporti per scarpe/zoccoli da sala operatoria o articoli per anestesia.




E 492

Inserto per un massimo di 9 ciotole reniformi, profondità massima 50 mm.



Praticità ed efficacia anche nei minimi dettagli!

Le immagini rappresentano solo alcuni esempi del design avanzato dei nostri accessori.

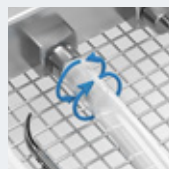

Sistema di tubi girevoli anti-torsione per facilitare il collegamento delle porte degli strumenti, evitando restrizioni del flusso d'acqua.




Supporti con diversi punti di contatto per una copertura completa del lavaggio degli strumenti

Flexible Loading System

C1802 Composizione dei moduli

C1809

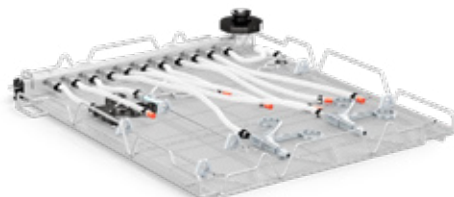


Dimensioni complessive

LxPxA:
530x600x91 mm /
20,86x23,62x3,58"

Spazio utile:

A 500 mm / 19,68"
B 490 mm / 19,29"

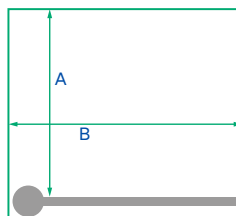

Articoli forniti:

11 tubi in silicone con connessione Luer Lock
50 x E 476, supporti per microstrumenti, Ø da 4 a 8 mm, da utilizzare in cestini a rete con griglia da 5 mm
50 x E 479, supporti per microstrumenti con Ø 4 mm, da utilizzare in cestini a rete con griglia da 5 mm

C1805




Dimensioni complessive

LxPxA:
227x521x93 mm /
8,93x20,51x3,66"

Spazio utile:

A 403 mm / 15,86"
B 215 mm / 8,46"

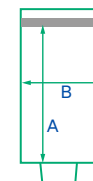

Articoli forniti:

1 x A 855, tubo flessibile in silicone con adattatore M Luer Lock per F Luer Lock, lunghezza 160 mm
2 x E 362, tappi ciechi
1 x E 447, F Adattatori Luer Lock per M Luer Lock
1 x E 449, adattatori M Luer Lock per F Luer Lock
2 x E 452, ugello iniettore, lunghezza 60 mm, Ø 2,5 mm
1 x E 472, morsetto a molla per getti iniettori Ø 4 mm
1 x ugello iniettore E 453 con morsetto di fissaggio, lunghezza 100 mm, Ø 4 mm

C1806




Dimensioni complessive

LxPxA:
530x539x79 mm /
20,86x21,22x3,11"

Spazio utile:

A 480 mm / 18,90"
B 383 mm / 15,08"
C 480 mm / 18,90"
P 470 mm / 18,50"

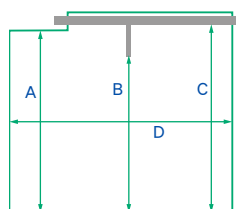

Articoli forniti:

2 x A 856, tubi in silicone con adattatore M Luer Lock per F Luer Lock, lunghezza 300 mm
1 x E 454 Ø 8,0 mm ugello di iniezione, getti radiali, H. 152 mm
2 x E 456 Sospensione a molla per tenere aperti gli strumenti MIS
1 x E 464 Supporto f. E 454 ugelli iniettori Ø 13 x 65 mm
1 x E 336, manicotto per irrigazione, lunghezza 121 mm, Ø 11 mm, 2 x E 362, tappi ciechi
6 x manicotti di irrigazione E 442 per strumenti Ø 4 - 8 mm, lunghezza 121 mm, Ø 11 mm, tappo con apertura Ø 6 mm
1 x E 443, manicotto per strumenti Ø 8 - 8,5 mm, lunghezza 121 mm, Ø 11 mm, cappuccio con apertura Ø 10 mm

C1808




Dimensioni complessive

LxPxA:
530x539x79 mm /
20,86x21,22x3,11"

Spazio utile:

A 477 mm / 18,78"
B 480 mm / 18,90"
C 468 mm / 18,42"
D 236 mm / 9,29"
E 203 mm / 7,99"

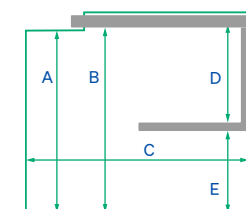

Articoli forniti:

2 x A 856, tubi flessibili in silicone con adattatore M Luer Lock per F Luer Lock, lunghezza 300 mm
10 x A 855, tubi in silicone con adattatore M Luer Lock per F Luer Lock, lunghezza 160 mm
1 x E 362, tappi ciechi, 3 x E 449, adattatori M Luer-Lock per F Luer-Lock
1 x E 452, ugello per iniettore, lunghezza 60 mm, Ø 2,5 mm, 1 x A 800, filtro tubolare riutilizzabile, lunghezza 405 mm, Ø 22,5 mm
11 x E 447, adattatori F Luer-Lock per M Luer Lock, 11 x E 517, adattatori M Luer-Lock per F Luer Lock
10 x E 476, supporti per microstrumenti, Ø da 4 a 8 mm, da utilizzare in cestini a rete con griglia da 5 mm
10 x E 477, supporti per microstrumenti, da utilizzare in cestini a rete con griglia da 5 mm

Flexible Loading System

Composizione dei moduli C1817

C1816



Dimensioni complessive

LxPxA:
189x523x85 mm /
7.44x20.59x3.34"

Articoli forniti:

22 x A 803, supporti
per contrangoli dentali,
manipoli e turbine

C1819



Dimensioni complessive

LxPxA:
245x518x239 mm /
9.64x20.39x9.40"

Articoli forniti:

6 bussole di prolunga per
trapani ortopedici

C1820



Dimensioni complessive

LxPxA:
143x518x352 mm /
5,62x20,39x13,85"

Articoli forniti:

8 x E 466 ugelli iniettori
per sacca di respirazione

C1821



Dimensioni complessive

LxPxA:
149x518x143 mm /
5.86x20.39x5.62"

Articoli forniti:

8 ugelli iniettori A 833

Accessori opzionali

															
C1805		•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•
C1806	•				•		•	•	•	•	•	•		•	•
C1808	incluso						•	•	•	•	•	•		•	•
C1809	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•
C1816	incluso						•	•	•	•	•	•		•	•

Carrelli di trasferimento e automazioni di carico

Progettato per soddisfare le esigenze di cliniche e centri di sterilizzazione di medie dimensioni, il DS 610 G2 presenta una gamma completa di soluzioni per la movimentazione dei carrelli di lavaggio, con dettagli mirati a migliorare l'ergonomia d'uso. Inoltre, il sistema comprende sportelli a doppia porta, finestre e trasportatori tampone per il ritorno dei cestelli di lavaggio.

T647
carrello di trasferimento regolabile in altezza



T641
carrello di trasferimento ad altezza fissa



PT 2P G2 610G2
Sportello a doppia anta



PT 1P G2 610G2
Sportello a porta singola



Capacità e dimensioni Layout e configurazioni

Modello	Altezza	Camera (AxPxL)			Ingombro (AxPxL)		
		Profondità	Larghezza	Altezza	Profondità	Larghezza	
DS 610 G2 (una porta)	728 mm	610 mm	570 mm	1940/2395* mm	700 mm	650 mm	
DS 610 G2 (due porte)	728 mm	610 mm	570 mm	1940/2395* mm	700 mm	650 mm	
DS 610 SL G2 (una porta)	728 mm	615 mm	570 mm	1940/2395* mm	700 mm	650 mm	
DS 610 SL G2 (due porte)	728 mm	615 mm	570 mm	1940/2395* mm	700 mm	650 mm	

Altezza di carico: 850 mm dal pavimento finito.
(*) L'altezza complessiva dell'apparecchio dipende dalla presenza del condensatore di vapore, dal suo tipo e dalla sua combinazione con altre opzioni.

Massimizza le prestazioni grazie agli esperti SteelcoBelimed

Soluzioni di assistenza

Prevenire è meglio che curare. I nostri piani di assistenza personalizzati garantiscono la massima operatività delle apparecchiature attraverso interventi di manutenzione preventiva studiati in base all'utilizzo dei dispositivi. Che si tratti di tecnici interni o del nostro team di esperti, le diverse soluzioni possono includere visite programmate di manutenzione preventiva, riparazioni e ricambi, a seconda delle opzioni scelte. Servizi opzionali, come la pulizia della camera e il monitoraggio della qualità dell'acqua, contribuiscono a ottimizzare le prestazioni e a controllare i costi, mantenendo le vostre operazioni fluide ed efficienti. Contattate il vostro rappresentante SteelcoBelimed per conoscere la gamma di servizi disponibili nella vostra area.

SteelcoBelimed Academy

SteelcoBelimed Academy offre un'ampia gamma di opzioni formative, pensate per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti delle centrali di sterilizzazione (CSSD). La struttura di formazione all'avanguardia di Riese, in Italia, serve le divisioni SteelcoBelimed Infection Control, Laboratory e Biomedical Research (BMR), con l'impressionante capacità di formare fino a 1.100 tecnici di assistenza all'anno. L'Academy rappresenta il nostro impegno a far progredire l'intero settore della sterilizzazione. I professionisti sanitari che si formano qui acquisiranno competenze che vanno oltre il semplice utilizzo delle apparecchiature, includendo la scienza del controllo delle infezioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro nella sterilizzazione. Queste conoscenze si traducono direttamente in una maggiore sicurezza per i pazienti e in una migliore efficienza operativa nelle loro strutture.

Contratti TCO (Total Cost of Ownership)

I nostri contratti TCO offrono una soluzione di assistenza pluriennale a costo fisso, garantendo stabilità di budget e valore a lungo termine. Bloccando le tariffe e riducendo l'esposizione all'aumento dei costi, questi contratti consentono una pianificazione finanziaria chiara. Ideali per prolungare la vita delle apparecchiature, i pacchetti all-inclusive riducono i costi operativi, proteggono gli investimenti e supportano gli obiettivi di sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita delle macchine.

Digitalizzazione nelle Operazioni di Assistenza

Le nostre soluzioni digitali consentono di accedere ai dati delle apparecchiature in tempo reale, aiutando i team di assistenza a monitorare le prestazioni e a identificare più rapidamente eventuali problemi. Dashboard intuitive e avvisi automatici rendono la manutenzione più predittiva ed efficiente. Questi strumenti favoriscono una migliore pianificazione, riducono i fermi imprevisti e semplificano la conformità normativa. Integrando i flussi di lavoro digitali nelle routine di assistenza, le strutture possono migliorare l'affidabilità e prendere decisioni più informate basate sull'effettivo utilizzo e sull'andamento delle performance.

SteelcoBelimed  Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-01-Steelco DS 610 G2 IT Rev.05.pdf

I prodotti in vendita possono differire da quelli descritti o illustrati in questa brochure a causa di modifiche successive alla produzione e/o di configurazioni opzionali.

I prodotti e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per informazioni aggiornate, consultare il proprio rivenditore Steelco.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com

 0051*

* Solo per i prodotti elencati nel certificato 065/MDR