

Armarios de Secado

para instrumental quirúrgico y de anestesia



Steelco

Miele Group Member

Fabricante y proveedor mundial de soluciones de limpieza y esterilización

Nacida de Steelco y Belimed, SteelcoBelimed es pionera en soluciones de flujo de trabajo estéril con innovación, fiabilidad y orientación al cliente. "Innovar con confianza" define nuestro compromiso con productos y servicios de alta calidad, estableciendo nuevos estándares industriales en el Control de Infecciones y las Ciencias biomédicas.

Centrados en el cliente

Nuestro compromiso es comprender plenamente las necesidades y la satisfacción de los clientes.

Nuestros productos y servicios están diseñados para satisfacer esas necesidades específicas, garantizando que cada decisión que tomamos beneficia a nuestros clientes para obtener los mejores resultados.

Eficiencia

Nos esforzamos por alcanzar la máxima productividad optimizando nuestros procesos, recursos y operaciones.

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones y servicios con rapidez y eficacia, sin concesiones, minimizando los residuos y maximizando el valor.

Innovación

Nuestra dedicación al progreso nos impulsa a buscar y adoptar constantemente nuevas ideas, tecnologías y métodos.

Este compromiso garantiza que nuestros productos y servicios evolucionen y mejoren continuamente.

Fiabilidad

Mantenemos nuestra palabra, ofreciendo soluciones sólidas y fiables en todo momento.

Nuestro objetivo es forjar relaciones duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo mediante el cumplimiento constante de nuestros compromisos.

Armarios de Secado para instrumental quirúrgico y de anestesia

Los armarios de secado Steelco son autónomos y garantizan un secado seguro y rápido del instrumental con un diseño de construcción en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad.

El secado por separado aumenta enormemente la capacidad para productos limpios y desinfectados. El diseño de doble puerta de paso minimiza la contaminación cruzada y garantiza un control superior de las infecciones.



ID 300

Capacidad: bandejas en ocho estantes
puerta(s) simple(s) o doble(s)



AD 400

Capacidad: 8 bandejas DIN 1/1 y hasta 36 tubos de anestesia o 18 bolsas de anestesia
puerta(s) simple(s) o doble(s)



Flexibilidad de instalación

Las puertas con cerradura pueden invertirse y configurarse para que se abran hacia la derecha o hacia la izquierda.

Capacidad y dimensiones

Modelo	Cámara útil (AnxPrxAI) - mm			Dimensiones totales (AnxPxAI)		
AD 400, ID 300	548	714*	1400	710	788**	1908

* Configuración de paso de doble puerta de 752 mm, ** Configuración de paso de doble puerta de 840 mm

Entorno de secado controlado

El flujo de aire con filtro HEPA 14 mantiene los artículos en un entorno controlado, mientras que el tratamiento indirecto con luz UV reduce la carga microbiana para una higiene superior.


Cuando se abre la puerta, la presión positiva bloquea el aire exterior, preservando el entorno controlado del armario. El panel de control LED permite configurar y supervisar fácilmente el proceso.



Flexibilidad en la configuración


ID 300:

- Conexión rápida a aire comprimido en cada nivel para secar instrumentos canulados
- La temperatura en el interior de la cámara puede ajustarse desde ambiente hasta 80° C.

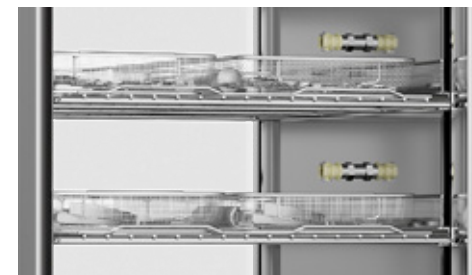

AD 400:

- Capacidad de 8 niveles, con estantes de malla.
- La temperatura en el interior de la cámara se ajusta a 40° C.
- Los soportes específicos permiten un secado rápido de las bolsas respiratorias

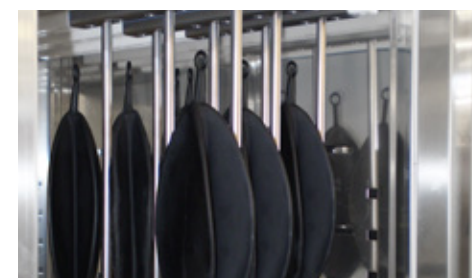

SteelcoBelimed

Miele

Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-03-Armarios de secado ID AD ES Rev.00

Los productos ofrecidos a la venta pueden diferir de los descritos o ilustrados en este folleto debido a cambios posteriores en la producción o/y configuraciones opcionales.

Los productos y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su distribuidor Steelco para obtener la información más reciente.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio
X (TV) - Italia



steelcobelimed.com