

# ProCare Med

Produits chimiques pour laveurs-désinfecteurs et nettoyage manuel



Steelco

Miele Group Member

# Fabricant et fournisseur mondial pour les solutions de nettoyage et de stérilisation

Né de Steelco et Belimed, SteelcoBelimed est un pionnier des solutions de flux de travail stériles alliant innovation, fiabilité et orientation client. "Innover en toute confiance" définit notre engagement à fournir des produits et des services de haute qualité, en établissant de nouvelles normes industrielles dans le domaine du contrôle des infections et des sciences de la vie.

## Orientation client

Notre engagement à comprendre pleinement les besoins et la satisfaction de nos clients est une priorité. Nos produits et services sont conçus pour répondre à ces besoins spécifiques, garantissant que chaque décision prise profite à nos clients pour les meilleurs résultats.

## Innovation

Notre volonté à innover nous pousse à chercher et à adopter en permanence de nouvelles idées, technologies et méthodes. Cet engagement garantit l'évolution et l'amélioration constantes de nos produits et services.

## Durabilité

Notre planète, notre responsabilité.  
Chez SteelcoBelimed, le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons : de l'optimisation des processus de production à la réduction de la consommation d'énergie, à la création de produits qui favorisent la protection de l'environnement. Pour nous, protéger l'avenir signifie agir aujourd'hui. Avec intégrité, détermination et un profond respect des personnes et de la planète.



## Fiabilité

Notre engagement est d'atteindre les plus hauts niveaux de productivité grâce à l'optimisation des processus, des ressources et des opérations. En proposant systématiquement des solutions fiables, nous assurons la création de valeur tout en minimisant les inefficacités. Notre objectif est d'établir des relations durables fondées sur la confiance, l'intégrité et le respect mutuel en honorant nos engagements de manière fiable.

## ProCare Med

### Produits chimiques pour laveurs-désinfecteurs et nettoyage manuel



Que vous procédiez à un nettoyage manuel ou que vous utilisiez un appareil à ultrasons ou un laveur-désinfecteur, il est important que vous obteniez les meilleurs résultats de nettoyage et que vous protégiez votre équipement et vos instruments.

De nombreux facteurs peuvent influencer sur les résultats du nettoyage, notamment la qualité des services et de l'équipement, le niveau et le type de salissures présentes, ainsi que l'utilisation du cycle et des produits chimiques appropriés.

---

#### Des chimies pour protéger vos patients, votre équipement et votre personnel

Procare Med est une gamme complète de produits chimiques soigneusement sélectionnés et testés pour couvrir les besoins de l'ensemble du cycle de traitement des instruments :

- Mousse de prétraitement manuelle à appliquer après l'utilisation des instruments
- Transport d'instruments contaminés
- Pré-nettoyage manuel
- Nettoyage à ultrasons
- Détergents alcalins doux, alcalins et enzymatiques pour le traitement automatisé dans les laveurs désinfecteurs d'instruments et les servantes
- Neutralisateurs organiques et inorganiques pouvant également être utilisés pour maintenir les instruments et les laveurs-désinfecteurs dans un état optimal
- Produits de rinçage pour raccourcir les temps de séchage
- Lubrifiants pour instruments
- Détartrant et détergent pour laveurs bassin

# Comment ProCare Med peut-il vous aider ?

Des solutions complètes pour chaque étape de votre processus de retraitement

## Efficacité, compatibilité et résultats exceptionnels avec les solutions ProCare Med

Steelco comprend que vous dirigez un service très actif et que vous êtes confronté à de nombreux défis au quotidien. Notre objectif est de vous fournir des solutions simples mais efficaces qui vous permettent d'obtenir les meilleurs résultats de retraitement à un coût raisonnable par cycle :

- en proposant une gamme complète pour répondre à vos besoins
- Proposant des produits qui ont été testés pour fournir des résultats de nettoyage exceptionnels
- garantissant une compatibilité optimale des matériaux afin de prolonger la durée de vie de vos instruments et équipements
- Fournissant des services de conseil gratuits pour identifier comment améliorer les résultats de nettoyage et résoudre les problèmes, tout en optimisant les coûts totaux et les temps de traitement
- Un guichet unique pour répondre à vos besoins en matière d'équipement et de chimie des procédés

### Tableau d'emballage

ProCare MED 60 LUB  
ProCare MED 40

### Prétraitement

ProCare MED 13 PRE

### Nettoyage manuel

ProCare MED 10 PRE

### Nettoyage sonore

ProCare MED 10 PRE

### Lavage automatisé

ProCare MED 10 MA  
ProCare MED 10 EN  
ProCare MED 10 A

### Neutralisation

ProCare MED 30 C  
ProCare MED 30 P

### Laveurs de bassins

#### Lavage

ProCare MED 10 BPA

### Détartreur

ProCare MED 10 BPD



# Produits pour le prétraitement manuel

## ProCare Med 13 PRE

### Mousse pour instruments pour le prétraitement manuel des instruments

Basé sur une formulation neutre et enzymatique spéciale, ProCare Med 13 PRE offre les propriétés suivantes :

- Minimise l'adhérence des souillures chirurgicales, ce qui facilite le nettoyage dans les laveurs-désinfecteurs
- Protège contre la corrosion
- Bonne rinçabilité dès la température ambiante, sans qu'il soit nécessaire de rincer manuellement en fonction des conditions locales
- Convient pour l'aluminium et l'aluminium anodisé
- Sûr et durable pour l'utilisateur
- Fourni dans un flacon pulvérisateur ergonomique de 500 ml facile à utiliser



Lorsqu'il y a un délai entre l'utilisation des instruments et leur retraitement, le séchage de la saleté sur les instruments les rend plus difficiles à retraiter. En outre, la corrosion peut commencer à se former sur les instruments.

ProCare Med 13 PRE aide à surmonter ces difficultés.

Emballage disponible : 20 x 500 mL

## ProCare MED 10 PRE

### Détergent respectueux de l'environnement pour une utilisation manuelle

Convient aux dispositifs médicaux thermostables, invasifs et non invasifs, tels que les instruments et ustensiles chirurgicaux, les instruments MIS, les endoscopes rigides, le matériel d'anesthésie, etc.

Grâce à un mélange optimal de tensioactifs, ProCare Med 10 PRE offre les propriétés suivantes :

- pH neutre avec un large spectre de compatibilité avec les matériaux
- Formule sans NTA ni phosphate
- Hautement biodégradable
- Faible dosage de 0,2 à 1 % par litre en fonction de l'application et des conditions locales



ProCare Med 10 PRE est un détergent doux pour le nettoyage manuel ou le trempage des instruments afin de prévenir l'adhérence de la saleté.

Convient également pour une utilisation dans les laveurs à ultrasons.

Capacité : 5 L



# Produits pour le nettoyage automatisé

## ProCare Med 10 MA

### Détergent polyvalent légèrement alcalin

Grâce à sa formulation unique, ProCare Med 10 MA élimine efficacement une large gamme d'impuretés organiques telles que le sang, les résidus de tissus, le mucus des instruments médicaux et présente les propriétés suivantes :

- Excellente compatibilité avec les matériaux, sans incompatibilité connue
- Peu moussant
- Peut être utilisé avec ou sans neutralisation
- Sans EDTA ni NTA, sans parfum ni colorant
- Biodégradable
- Faible dosage, typiquement de 1 à 6 ml/L avec 5 minutes de lavage selon les conditions locales



Capacité : 5 L, 10 L, 25L, 200L

## ProCare Med 10 FR

### Détergent enzymatique pour le traitement automatisé

Grâce à sa puissante formulation enzymatique, ProCare Med 10 EN élimine efficacement une large gamme d'impuretés organiques telles que le sang, les résidus de tissus, le mucus des instruments médicaux et présente les propriétés suivantes :

- Compatibilité exceptionnelle avec les matériaux, sans incompatibilité connue
- Excellente performance de nettoyage
- Peu moussant
- Compatible avec l'eau dure
- Pas de neutralisation nécessaire
- Sans EDTA ni NTA
- Sans colorants ni parfums
- Hautement biodégradable
- Dosé de 2 à 10ml/L (eau dure) selon les conditions locales



Capacité : 5 L, 200L





### ProCare Med 10 A

#### Détergent alcalin polyvalent pour traitement automatisé

- Élimine en douceur mais efficacement le sang, les résidus de tissus et les protéines
- Excellentes propriétés d'élimination et de dispersion des contaminants
- Excellente compatibilité avec une large gamme de matériaux, notamment l'acier inoxydable, les matières plastiques, les élastomères, le caoutchouc, le latex, la céramique et le verre. Ne convient pas à l'aluminium anodisé ou au titane
- Exempt d'agents tensioactifs et d'alcalis caustiques
- Selon les conditions locales de l'eau, le dosage est de 3 à 10 ml/L
- ProCare Med 10 A est suivi d'un rinçage intermédiaire de neutralisation à l'aide du neutralisant inorganique ProCare Med 30 P

Détergent alcalin pour laveurs-désinfecteurs destinés au traitement automatisé des dispositifs médicaux thermostables, invasifs et non invasifs réutilisables, tels que les instruments chirurgicaux et MIS, les équipements anesthésiques, respiratoires et autres équipements médicaux.



Capacité : 5 L, 200 L

### ProCare Med 30 C

#### Agent neutralisant à base d'acide organique

- Élimine en douceur les résidus alcalins des articles traités
- Peut prolonger la durée de vie des instruments en évitant les taches sur les articles traités avec des détergents alcalins qui pourraient endommager les matériaux dans le stérilisateur
- Convient au matériel d'anesthésie, à l'acier inoxydable, à l'aluminium (anodisé), aux matières plastiques, au caoutchouc, au verre et à la céramique
- Sans tensioactifs ni phosphates
- Contrôle le dépôt de calcaire dans les laveurs-désinfecteurs
- Un dosage de 1 à 3 ml/L donne de bons résultats

Neutralisant à base d'acide organique pour les laveurs-désinfecteurs après le nettoyage alcalin automatisé des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non invasifs tels que les instruments chirurgicaux et MIS, les endoscopes rigides, le matériel anesthésique et respiratoire, les ustensiles de salle, les conteneurs de stérilisation en aluminium et d'autres équipements médicaux.



Capacité : 5 L, 200 L

# Produits pour le nettoyage automatisé

## ProCare Med 30 P

### Agent neutralisant à base d'acide inorganique

- Élimine efficacement les résidus alcalins des articles traités
- Peut prolonger la durée de vie des instruments en évitant les taches sur les articles traités avec des détergents alcalins qui pourraient endommager les matériaux pendant la stérilisation
- Exempt d'agents tensioactifs
- Convient à l'acier inoxydable, aux matières plastiques, au verre et à la céramique, mais incompatible avec l'aluminium anodisé et le zinc
- Contrôle le dépôt de calcaire dans les laveurs-désinfecteurs
- Peut être utilisé pour rajeunir les instruments en acier inoxydable sujets à la corrosion
- Un dosage de 1 à 3 ml/L donne de bons résultats



Neutralisant à base d'acide inorganique pour les laveurs désinfecteurs après le nettoyage alcalin automatisé des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs réutilisables tels que les instruments chirurgicaux et les ustensiles chirurgicaux.

Capacité : 5 L, 25 L

## ProCare MED 40

### Produit de rinçage biocompatible pour le traitement automatisé

- Réduit la tension superficielle de l'eau et raccourcit considérablement le temps de séchage
- Réduit les traces d'eau sur les produits
- Biocompatibilité approuvée et n'interfère pas avec le processus de stérilisation
- Compatible avec le recyclage de l'eau de rinçage final en vue d'une utilisation pendant la phase de lavage ou de rinçage intermédiaire du cycle suivant
- pH neutre et bonne compatibilité avec les matériaux. Convient à l'acier inoxydable, à l'aluminium (anodisé), aux métaux non ferreux, au PVC, au caoutchouc, au plastique, aux matériaux, à la céramique. Pour le polysulfone (PSU) et le polyphénylsulfone (PPSU), le PVC, le caoutchouc, des tests de compatibilité doivent être effectués avant l'utilisation
- Selon la qualité de l'eau, un dosage de 0,3 à 1,0 ml/L donne de bons résultats



Dosé dans l'eau de rinçage final des laveurs-désinfecteurs, ProCare Med 40 raccourcit le temps de séchage des dispositifs médicaux réutilisables, invasifs et non invasifs, tels que les instruments chirurgicaux et MIS, et les ustensiles. Convient aux laveurs désinfecteurs à grande chambre pour réduire le temps de séchage des lits et des servantes.

Capacité : 5 L, 25 L, 200L



# Produits pour l'entretien des instruments

## ProCare Med 60 LUB

### Lubrifiant pour l'entretien des instruments utilisés dans les processus automatisés

- Biocompatible et permet la pénétration de la vapeur pendant la stérilisation à la vapeur
- Convient à l'acier inoxydable, créant une fine couche de protection
- Ne convient pas au caoutchouc, au latex, aux composants de circuits d'anesthésie ou de ventilation, ni aux bains de trempage
- Convient aux laveurs-désinfecteurs Steelco. Pour les autres marques d'équipement, vérifier avant l'utilisation que le système de dosage et les autres composants des laveurs-désinfecteurs sont résistants à l'huile. Vérifier l'adéquation du joint de porte du laveur-désinfecteur et du stérilisateur
- Dosage typique 0,5-1 ml/L

A base d'huile blanche médicinale et d'émulsifiants, mélangée à l'eau, elle crée une émulsion homogène qui forme une fine pellicule protectrice sur les surfaces des instruments en acier inoxydable, les protégeant ainsi de la corrosion par frottement (charnières et articulations). Il ne devient pas résineux pendant la stérilisation et n'entraîne pas de croissance microbienne.



Capacité : 5 L

# Produits pour laveurs bassin

## ProCare MED 10 BPD

### Détartrant pour laveurs bassin

- Agent complexant à base d'acide citrique
- Empêche la formation de calcaire dans la chambre, les éléments chauffants et les charges
- Peut également être utilisé en cas d'eau dure
- Formule peu moussante
- Dosage faible de 0,5 à 1,5 ml /L en fonction de la dureté de l'eau

L'agent complexant (détartrant) empêche la formation de calcaire, en particulier sur les éléments chauffants et la chambre qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner des cycles plus longs et des coûts d'utilisation plus élevés. L'utilisation du ProCare Med 10 BPD prolonge la durée de vie de la machine et des charges, car il peut réduire la décoloration des bassins en plastique et des bouteilles d'urine.



Capacité : 5 L

## ProCare MED 10 BPA

### Détergent pour laveurs bassin

- Détergent liquide alcalin concentré
- Peu moussant
- Élimination des salissures persistantes
- Faible dosage de 1-3ml/L en fonction de la dureté de l'eau
- Convient aux cycles d'élimination de Clostridium Difficile
- Convient aux machines équipées de 2 pompes doseuses

Détergent alcalin offrant d'excellents résultats de nettoyage, utilisé dans les laveurs bassin pour le nettoyage des bassins et des flacons d'urine.



Capacité : 5 L

# Système de distribution chimique centralisé


Pour l'alimentation automatique en produits chimiques de différents laveurs, unités à ultrasons ou éviers manuels dans les CSSD

Pour l'approvisionnement automatique en produits chimiques des laveurs désinfecteurs, des unités à ultrasons ou des éviers manuels dans les CSSD, ce système constitue une solution idéale pour réduire le chargement manuel fréquent de petits récipients dans chaque laveur désinfecteur, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

Cette solution renforce la sécurité des opérateurs et élimine le risque de mélange des produits chimiques. Elle est disponible sous la forme d'un système modulaire qui peut être intégré avec une surveillance à distance et des dispositifs de sécurité supplémentaires.

Principaux avantages du système :

- Réduction des coûts grâce à l'achat de barils de produits chimiques.
- Plus besoin de remplacer les petits conteneurs.
- Réduction du risque d'échange de produits chimiques.
- Surveillance constante des niveaux de produits chimiques dans les fûts et les réservoirs tampons.

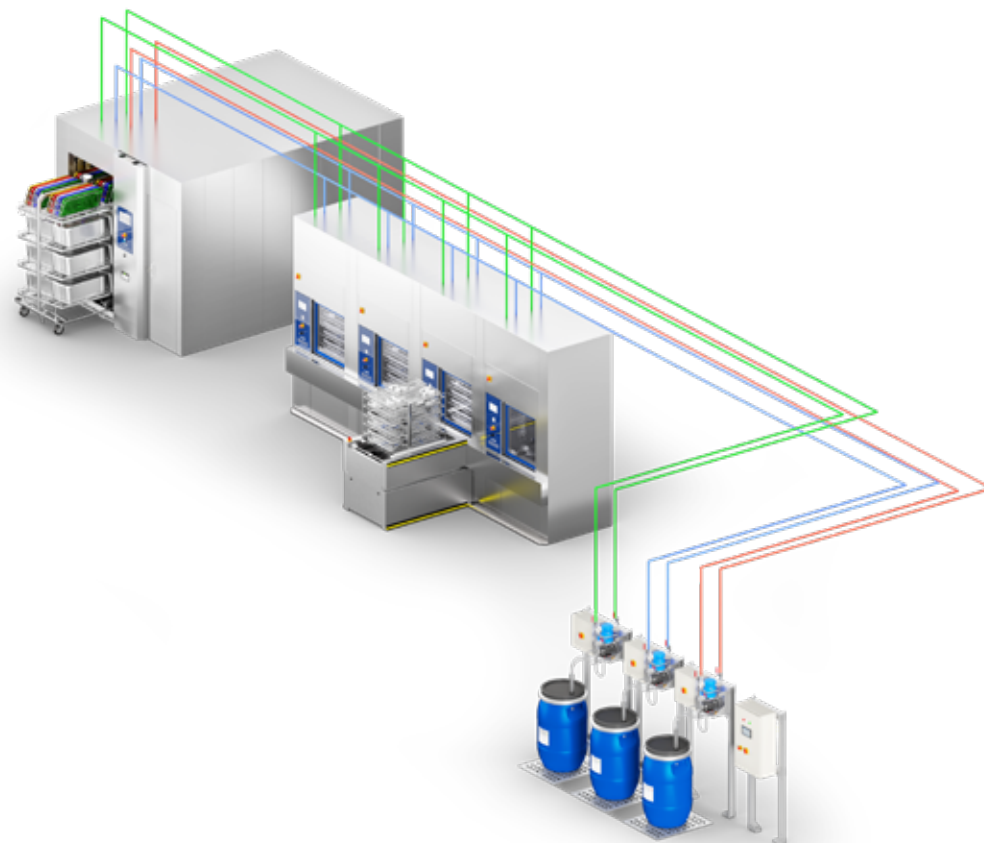

# Des performances maximisées avec les experts de SteelcoBelimed

## Plans de service

Mieux vaut prévenir que guérir. Nos plans de service sur mesure garantissent une disponibilité maximale de l'équipement grâce à une maintenance préventive personnalisée en fonction de l'utilisation de la machine. Que vous fassiez appel à vos propres techniciens ou à notre équipe d'experts, différentes solutions peuvent inclure des visites préventives programmées, des réparations et des pièces détachées, selon les options choisies. Des services additionnels, tels que le nettoyage de la chambre et la surveillance de la qualité de l'eau, permettent d'optimiser les performances et de maîtriser les coûts, afin que vos opérations se déroulent de manière fluide et efficace.

Renseignez-vous auprès de votre représentant SteelcoBelimed local pour connaître la gamme de services proposés dans votre région.

## Académie

L'Académie SteelcoBelimed propose une gamme variée de formations adaptées aux besoins spécifiques des professionnels des services de stérilisation. Le centre de formation de pointe situé à Riese, en Italie, dessert pour SteelcoBelimed les divisions Contrôle des infections, Laboratoire et Recherche biomédicale (BMR), avec une capacité impressionnante de formation pouvant accueillir jusqu'à 1100 techniciens par an. L'Académie incarne notre engagement à faire progresser l'ensemble du domaine du traitement stérile. Les professionnels de santé qui suivent une formation ici acquièrent des connaissances qui vont au-delà du fonctionnement des équipements pour englober la prévention des infections et l'optimisation des processus de stérilisation. Ces connaissances se traduisent directement par une amélioration de la sécurité des patients et de l'efficacité opérationnelle dans leurs établissements.

## Contrats TCO

Nos contrats TCO (Total Cost of Ownership) offrent une solution pluriannuelle de service à coût fixe qui garantit la stabilité budgétaire et une valeur à long terme. En fixant les tarifs et en minimisant l'exposition à la hausse des coûts, ces contrats permettent une planification financière claire. Idéaux pour prolonger la durée de vie de votre équipement, ces forfaits tout compris réduisent les coûts d'exploitation, protègent les investissements et soutiennent les objectifs de durabilité tout au long du cycle de vie de l'équipement.

## Digitalisation

Nos solutions digitales donnent accès à des données en temps réel sur les équipements, aidant ainsi les équipes de maintenance à surveiller les performances et à identifier plus rapidement tout problème potentiel. Des tableaux de bord clairs et des alertes automatisées permettent une maintenance prédictive et plus efficace. Ces outils favorisent une meilleure planification, réduisent les temps d'arrêt imprévus et simplifient la mise en conformité. En intégrant des flux de travail numériques dans les routines de maintenance, les établissements peuvent améliorer la fiabilité et prendre des décisions plus éclairées basées sur l'utilisation réelle et les tendances de performance.

**SteelcoBelimed**  Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-02 Steelco ProCare Med Rev.02.pdf

Les produits proposés à la vente peuvent différer de ceux décrits ou illustrés dans cette brochure en raison de modifications ultérieures de la production et/ou de configurations optionnelles.

Les produits et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Veuillez contacter votre revendeur Steelco pour obtenir les informations les plus récentes.

Steelco S.p.A.  
Via Balegante, 27 - 31039  
Riese Pio X (TV) - Italy

[steelcobelimed.com](http://steelcobelimed.com)

