

ProCare Med

Prodotti chimici per lavastrumenti e lavaggio manuale



Steelco

Produttore e fornitore globale di soluzioni per il lavaggio e la sterilizzazione

Nata dall'unione di Steelco e Belimed, SteelcoBelimed è pioniera nelle soluzioni per i flussi sterili, con innovazione, affidabilità e attenzione al cliente. "Innovate with confidence" esprime il nostro impegno per prodotti e servizi di alta qualità, stabilendo nuovi standard nel settore del Controllo delle Infezioni e delle Scienze della Vita.

Il cliente al centro

Il nostro impegno è comprendere pienamente le esigenze e la soddisfazione dei clienti. I nostri prodotti e servizi sono progettati per rispondere a queste necessità specifiche, assicurando che ogni decisione che prendiamo porti benefici ai clienti per ottenere i migliori risultati.

Innovazione

La nostra dedizione al progresso ci spinge a cercare e abbracciare costantemente nuove idee, tecnologie e metodi. Questo impegno garantisce che i nostri prodotti e servizi evolvano e migliorino continuamente.

Sostenibilità



Il nostro pianeta, la nostra responsabilità. In SteelcoBelimed, la sostenibilità è parte integrante di tutto ciò che facciamo: dall'ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione dei consumi energetici alla creazione di prodotti che favoriscono la tutela ambientale. Per noi, proteggere il futuro significa agire oggi. Con integrità, determinazione e profondo rispetto per le persone e per il pianeta.

Affidabilità

Il nostro impegno è raggiungere i più alti livelli di produttività attraverso l'ottimizzazione di processi, risorse e operazioni. Fornendo costantemente soluzioni affidabili, garantiamo la creazione di valore riducendo al minimo le inefficienze. Il nostro obiettivo è instaurare relazioni durature basate su fiducia, integrità e rispetto reciproco, adempiendo con affidabilità ai nostri impegni.



Sia che si proceda alla pulizia manuale o che si utilizzi un'unità a ultrasuoni o una lavastrummenti, è importante ottenere i migliori risultati di pulizia e proteggere le apparecchiature e gli oggetti trattati.

Molti fattori diversi possono influenzare i risultati del lavaggio, tra cui la qualità dei servizi e delle apparecchiature, il livello e il tipo di sporco presente, nonché l'utilizzo del ciclo e dei prodotti chimici di processo appropriati.

Prodotti chimici per la protezione dei pazienti, delle apparecchiature e del personale

Procare Med è una gamma completa di prodotti chimici accuratamente selezionati e testati per soddisfare le esigenze dell'intero ciclo di lavorazione degli strumenti, tra cui:

- Schiuma di pretrattamento manuale da applicare dopo l'uso degli strumenti
- Trasporto di strumenti contaminati
- Pre-lavaggio manuale
- Lavaggio a ultrasuoni
- Detergenti alcalini, alcalini ed enzimatici per il trattamento automatizzato in lavastrummenti e lava-carrelli
- Neutralizzanti organici e inorganici che possono essere utilizzati anche per mantenere gli strumenti e le lavastrummenti in condizioni ottimali
- Agenti di risciacquo per ridurre i tempi di asciugatura
- Lubrificanti per strumenti
- Disincrostanti e detergenti per lavastrummenti


Come può aiutarvi ProCare Med?

Soluzioni complete per ogni fase del vostro flusso di lavoro di ritrattamento

Efficienza, compatibilità e risultati eccellenti con le soluzioni ProCare Med

Steelco è consapevole che il vostro reparto è molto impegnato e che dovete affrontare molte sfide ogni giorno. Il nostro obiettivo è quello di fornirvi soluzioni semplici ma efficaci che vi aiutino a ottenere i migliori risultati di ricondizionamento in termini di costi per ciclo:

- disponendo di una gamma completa per soddisfare le vostre esigenze
- offrendo prodotti testati per fornire risultati di pulizia eccezionali
- Assicurando una compatibilità ottimale dei materiali per prolungare la vita dei vostri strumenti e delle vostre apparecchiature
- Fornendo servizi di consulenza gratuiti per individuare come migliorare i risultati di pulizia e risolvere i problemi, ottimizzando i costi totali e i tempi di processo
- Offrire uno sportello unico per soddisfare le esigenze delle apparecchiature e dei prodotti chimici di processo

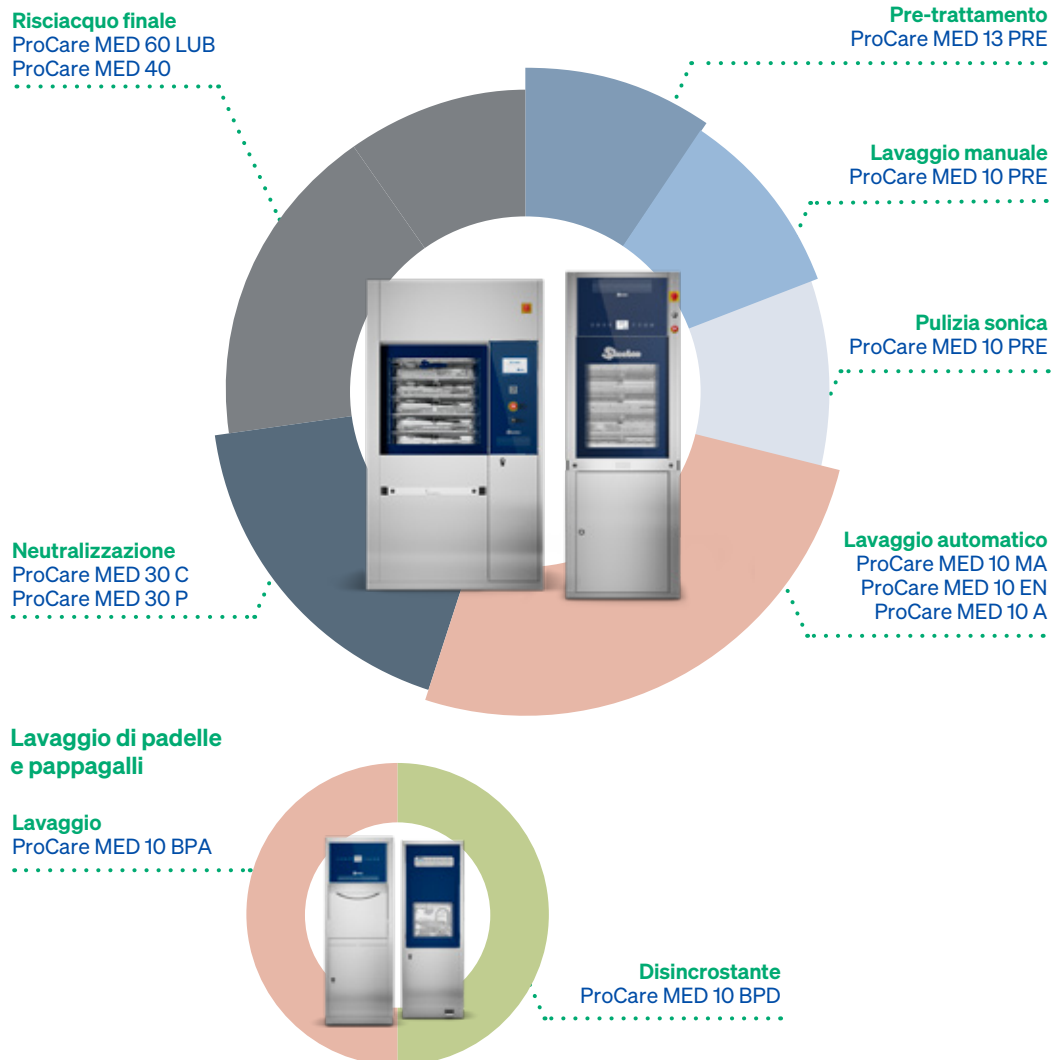

Prodotti per il trattamento preliminare manuale

ProCare Med 13 PRE

Schiuma per il pretrattamento manuale degli strumenti

Basato su una formulazione neutra ed enzimatica, ProCare Med 13 PRE offre le seguenti proprietà:

- Riduce al minimo l'adesione dei residui chirurgici, consentendo una pulizia più agevole nelle lavastrumenti
- Protegge dalla corrosione
- Elevata risciacquabilità già a temperatura ambiente, con possibilità di eliminare le operazioni manuali in funzione delle condizioni operative locali
- Adatto per alluminio e alluminio anodizzato
- Sicuro e sostenibile per l'utente
- Fornito in un flacone spray ergonomico e facile da usare da 500 ml



Quando gli strumenti vengono utilizzati e lavorati con un certo ritardo, la sporcizia si asciuga su di essi e ne rende più difficile la rilavorazione. Inoltre, sugli strumenti può formarsi la corrosione.

ProCare Med 13 PRE aiuta a superare questi problemi.

Confezione disponibile: 20 x 500 mL

ProCare MED 10 PRE

Detergente ecologico per uso manuale

Adatto per l'uso con dispositivi medici termostabili, invasivi e non invasivi, come strumenti e utensili chirurgici, strumenti MIS, endoscopi rigidi, apparecchiature anestetiche ecc.

Grazie a una miscela ottimale di tensioattivi, ProCare Med 10 PRE offre le seguenti proprietà:

- pH neutro con un ampio spettro di compatibilità con i materiali
- Basato su una formula priva di NTA e fosfati
- Altamente biodegradabile
- Dosaggio ridotto dello 0,2-1% per litro, a seconda dell'applicazione e delle condizioni locali



ProCare Med 10 PRE è un detergente delicato per la pulizia manuale o l'immersione di strumenti per prevenire l'adesione dello sporco.

Adatto anche per l'uso in lavastrumenti a ultrasuoni.

Capacità: 5 L



Prodotti per la pulizia automatizzata

ProCare Med 10 MA

Detergente multiuso leggermente alcalino

Grazie alla sua formulazione unica, ProCare Med 10 MA rimuove efficacemente un'ampia gamma di impurità organiche come sangue, residui di tessuto e muco dagli strumenti medici e presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente compatibilità con i materiali, senza incompatibilità note
- Bassa formazione di schiuma
- Può essere utilizzato con o senza neutralizzazione
- Privo di EDTA e NTA, senza profumi o coloranti
- Biodegradabile
- Basso dosaggio, in genere da 1 a 6 ml/L con 5 minuti di lavaggio a seconda delle condizioni locali



Capacità: 5 L, 10 L, 25L, 200L

ProCare Med 10 EN

Detergente enzimatico per il trattamento automatizzato

Grazie alla sua formulazione enzimatica, ProCare Med 10 EN rimuove efficacemente un'ampia gamma di impurità organiche come sangue, residui di tessuto e muco dagli strumenti medici e presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente compatibilità con i materiali, senza incompatibilità note
- Eccellenti prestazioni di pulizia
- Bassa formazione di schiuma
- Compatibile con acqua dura
- Non richiede neutralizzazione
- Senza EDTA e NTA
- Privo di coloranti e profumi
- Altamente biodegradabile
- Dosaggio da 2 a 10ml/L (acqua dura) a seconda delle condizioni locali



Capacità: 5 L, 200L

Detergente per termodisinfettori a base di enzimi e tensioattivi avanzati per il trattamento automatizzato di dispositivi medici invasivi e non invasivi riutilizzabili, come strumenti chirurgici e MIS, endoscopi rigidi, apparecchiature anestetiche e respiratorie, utensili di reparto, contenitori di sterilizzazione in alluminio.

Detergente enzimatico con tensioattivi per termodisinfettori per il trattamento automatizzato di dispositivi medici invasivi e non invasivi riutilizzabili, come strumenti chirurgici e MIS, endoscopi rigidi, apparecchiature anestetiche e respiratorie, utensili di reparto, contenitori di sterilizzazione in alluminio.





ProCare Med 10 A

Detergente alcalino multiuso per trattamenti automatizzati

- Rimuove delicatamente ma efficacemente sangue, residui di tessuto e proteine
- Eccellenti proprietà di rimozione e dispersione dei contaminanti
- Buona compatibilità con un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio inossidabile, materie plastiche, elastomeri, gomma, lattice, ceramica e vetro. Non adatto per alluminio anodizzato o titanio
- Privo di tensioattivi e alcali caustici
- A seconda delle condizioni locali dell'acqua, il dosaggio è compreso tra 3 e 10 ml/L
- ProCare Med 10 A è seguito da una fase di risciacquo intermedio di neutralizzazione con il neutralizzatore inorganico ProCare Med 30 P

Detergente alcalino per termodisinfettori per il trattamento automatizzato di dispositivi medici riutilizzabili termostabili, invasivi e non invasivi, come strumenti chirurgici e MIS, apparecchiature anestetiche, respiratorie e altre apparecchiature mediche.



Capacità: 5 L, 200 L

ProCare Med 30 C

Agente neutralizzante a base di acido organico

- Rimuove delicatamente i residui alcalini dagli strumenti trattati
- Può prolungare la vita degli strumenti evitando la formazione di macchie sugli articoli trattati con detergenti alcalini che potrebbero danneggiare i materiali durante la sterilizzazione
- Adatto per materiale per anestesia, acciaio inox, alluminio (anodizzato), materiali plastici, gomma, vetro e ceramica
- Senza tensioattivi e senza fosfati
- Previene la formazione di calcare nei disinfettori
- Il dosaggio da 1 a 3 ml/L fornisce buoni risultati

Neutralizzante a base di acidi organici per lavastumenti dopo la pulizia automatica alcalina di dispositivi medici invasivi e non invasivi riutilizzabili, come strumenti chirurgici e MIS, endoscopi rigidi, apparecchiature anestetiche e respiratorie, utensili di reparto, contenitori di sterilizzazione in alluminio e altre apparecchiature mediche.



Capacità: 5 L, 200 L

Prodotti per la pulizia automatizzata

ProCare Med 30 P

Agente neutralizzante a base di acido inorganico

- Rimuove efficacemente i residui alcalini dagli oggetti trattati
- Può prolungare la vita degli strumenti evitando la formazione di macchie sugli articoli trattati con detergenti alcalini che potrebbero danneggiare i materiali durante la sterilizzazione
- Privo di tensioattivi
- Adatto per acciaio inossidabile, materiali plastici, vetro e ceramica, ma incompatibile con alluminio anodizzato e zinco
- Controlla la deposizione di calcare nei disinfettori per lavatrici
- Può essere utilizzato per ringiovanire gli strumenti in acciaio inox soggetti a corrosione
- Il dosaggio da 1 a 3 ml/L fornisce buoni risultati



Neutralizzatore a base di acidi inorganici per lavastumenti dopo la pulizia automatica alcalina di dispositivi medici invasivi e non invasivi riutilizzabili, come strumenti chirurgici e utensili.

Capacità: 5 L, 25 L

ProCare MED 40

Brillantante biocompatibile per processi automatizzati

- Abbassa la tensione superficiale dell'acqua e riduce notevolmente i tempi di asciugatura
- Riduce le striature dei segni d'acqua sui prodotti
- Biocompatibilità approvata e non interferisce con il processo di sterilizzazione
- Compatibile con il riciclo dell'acqua di risciacquo finale per l'utilizzo durante il lavaggio o la fase di risciacquo intermedio del ciclo successivo
- pH neutro e buona compatibilità con i materiali. Adatto per acciaio inox, alluminio (anodizzato), metalli non ferrosi, PVC, gomma, plastica, materiali, ceramica. Per polisulfone (PSU) e polifenilsulfone (PPSU), PVC, gomma, è necessario effettuare test di idoneità prima dell'uso
- A seconda della qualità dell'acqua, il dosaggio da 0,3 a 1,0 ml/L fornisce buoni risultati



Dosato nell'acqua di risciacquo finale delle lavastumenti, ProCare Med 40 riduce i tempi di asciugatura dei dispositivi medici riutilizzabili, invasivi e non invasivi, come strumenti chirurgici e MIS, e degli utensili. Adatto alle lavastumenti per ridurre i tempi di asciugatura di letti e carrelli di distribuzione.

Capacità: 5 L, 25 L, 200L



Prodotti per la cura degli strumenti

ProCare Med 60 LUB

Lubrificante per la cura degli strumenti utilizzati nei processi automatizzati

- Biocompatibile e consente la penetrazione del vapore durante la sterilizzazione a vapore
- Adatto per l'acciaio inossidabile, creando un sottile strato protettivo
- Non adatto per gomma, lattice o componenti di circuiti di anestesia o ventilazione o bagni di immersione
- Adatto all'uso con le lavastrumeni Steelco. Per altre marche di apparecchiature, prima dell'uso verificare che il sistema di dosaggio e gli altri componenti delle lavastrumeni siano resistenti all'olio. Verificare l'idoneità della guarnizione dello sportello del disinfettore e dello sterilizzatore
- Dosaggio tipico 0,5-1 ml/L

A base di olio bianco medicinale ed emulsionanti, miscelato con acqua, crea un'emulsione omogenea che forma un sottile film protettivo sulle superfici degli strumenti in acciaio inossidabile, proteggendoli dalla corrosione da attrito (cerniere e articolazioni). Non diventa resinoso durante la sterilizzazione e non favorisce la crescita microbica.



Capacità: 5 L

Prodotti per lavapadelle

ProCare MED 10 BPD

Disincrostante per lavapadelle

- Agente complessante a base di acido citrico
- Previene la formazione di calcare nella camera, negli elementi riscaldanti e nei carichi
- Può essere utilizzato anche con acqua dura
- Formulazione a bassa formazione di schiuma
- Dosaggio ridotto, da 0,5 a 1,5 ml /L, a seconda del livello di durezza dell'acqua

L'agente complessante (disincrostante) previene la formazione di calcare, soprattutto sugli elementi riscaldanti e sulla camera, che, se non trattati, possono causare cicli più lunghi e un aumento dei costi di gestione. L'uso di ProCare Med 10 BPD prolunga la durata della macchina e dei carichi, in quanto può ridurre lo scolorimento di padelle e bottiglie di urina in plastica.



Capacità: 5 L

ProCare MED 10 BPA

Detergente per padelle

- Detergente liquido alcalino concentrato
- A bassa formazione di schiuma
- Rimozione di sporco persistente
- Basso dosaggio di 1-3ml/L a seconda della durezza dell'acqua
- Adatto per cicli di rimozione del Clostridium Difficile
- Adatto per macchine dotate di 2 pompe dosatrici

Detergente alcalino che fornisce ottimi risultati di pulizia, utilizzato nelle lavatrici per padelle per la pulizia di padelle e bottiglie di urina.



Capacità: 5 L

Sistema centralizzato di

Sistema di dosaggio chimico centralizzato


Per la fornitura automatica di prodotti chimici a diverse lavastumenti, unità a ultrasuoni o lavaggio manuale nei reparti CSSD

Per la fornitura automatica di prodotti chimici a diverse lavastumenti, unità a ultrasuoni o lavaggio manuale nei reparti CSSD, questo sistema offre una soluzione ideale per ridurre il frequente caricamento manuale di piccole taniche in ogni termodisinfettore, risparmiando tempo e costi.

La soluzione aumenta la sicurezza dell'operatore ed elimina il rischio di mescolare i prodotti chimici. È disponibile come sistema modulare che può essere integrato con il monitoraggio remoto e con dispositivi di sicurezza aggiuntivi.

Principali vantaggi del sistema:

- Riduzione dei costi grazie all'acquisto di barili di prodotti chimici.
- Non è più necessario sostituire le taniche.
- Riduzione del rischio di scambio di prodotti chimici.
- Monitoraggio costante dei livelli dei prodotti chimici nei barili e nei serbatoi tampone.

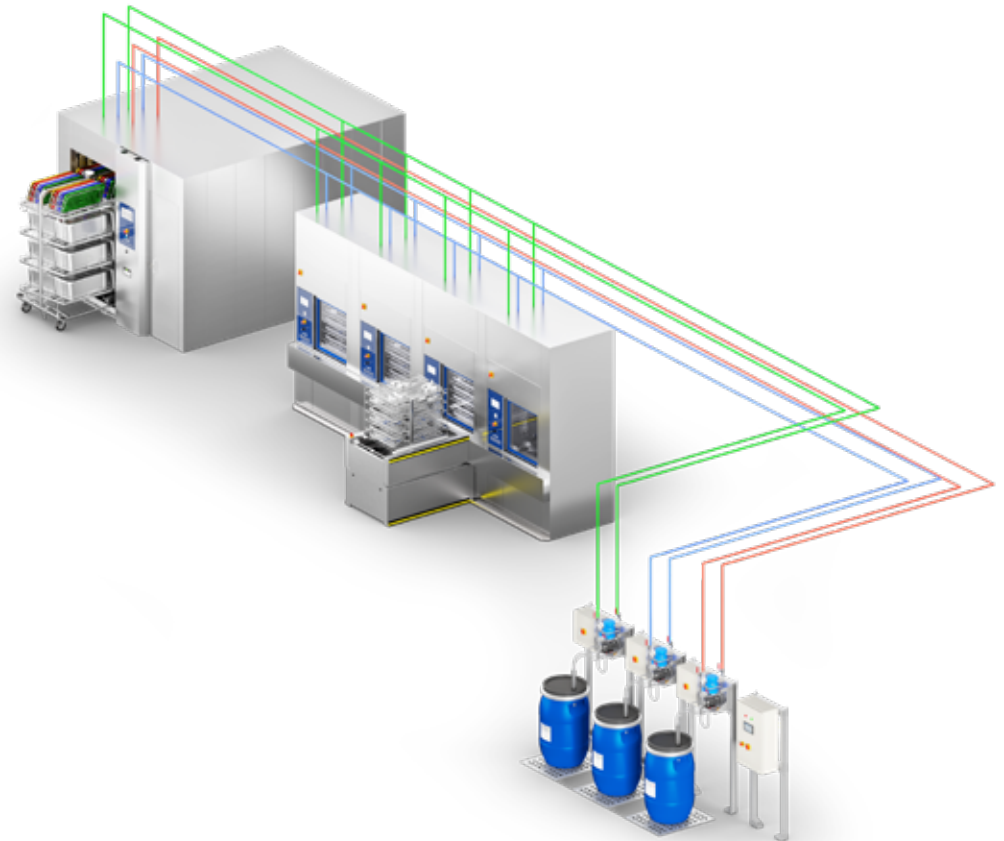

Massimizza le prestazioni grazie agli esperti SteelcoBelimed

Soluzioni di assistenza

Prevenire è meglio che curare. I nostri piani di assistenza personalizzati garantiscono la massima operatività delle apparecchiature attraverso interventi di manutenzione preventiva studiati in base all'utilizzo dei dispositivi. Che si tratti di tecnici interni o del nostro team di esperti, le diverse soluzioni possono includere visite programmate di manutenzione preventiva, riparazioni e ricambi, a seconda delle opzioni scelte. Servizi opzionali, come la pulizia della camera e il monitoraggio della qualità dell'acqua, contribuiscono a ottimizzare le prestazioni e a controllare i costi, mantenendo le vostre operazioni fluide ed efficienti. Contattate il vostro rappresentante SteelcoBelimed per conoscere la gamma di servizi disponibili nella vostra area.

SteelcoBelimed Academy

SteelcoBelimed Academy offre un'ampia gamma di opzioni formative, pensate per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti delle centrali di sterilizzazione (CSSD). La struttura di formazione all'avanguardia di Riese, in Italia, serve le divisioni SteelcoBelimed Infection Control, Laboratory e Biomedical Research (BMR), con l'impressionante capacità di formare fino a 1.100 tecnici di assistenza all'anno. L'Academy rappresenta il nostro impegno a far progredire l'intero settore della sterilizzazione. I professionisti sanitari che si formano qui acquisiranno competenze che vanno oltre il semplice utilizzo delle apparecchiature, includendo la scienza del controllo delle infezioni e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro nella sterilizzazione. Queste conoscenze si traducono direttamente in una maggiore sicurezza per i pazienti e in una migliore efficienza operativa nelle loro strutture.

Contratti TCO (Total Cost of Ownership)

I nostri contratti TCO offrono una soluzione di assistenza pluriennale a costo fisso, garantendo stabilità di budget e valore a lungo termine. Bloccando le tariffe e riducendo l'esposizione all'aumento dei costi, questi contratti consentono una pianificazione finanziaria chiara. Ideali per prolungare la vita delle apparecchiature, i pacchetti all-inclusive riducono i costi operativi, proteggono gli investimenti e supportano gli obiettivi di sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita delle macchine.

Digitalizzazione nelle Operazioni di Assistenza

Le nostre soluzioni digitali consentono di accedere ai dati delle apparecchiature in tempo reale, aiutando i team di assistenza a monitorare le prestazioni e a identificare più rapidamente eventuali problemi. Dashboard intuitive e avvisi automatici rendono la manutenzione più predittiva ed efficiente. Questi strumenti favoriscono una migliore pianificazione, riducono i fermi imprevisti e semplificano la conformità normativa. Integrando i flussi di lavoro digitali nelle routine di assistenza, le strutture possono migliorare l'affidabilità e prendere decisioni più informate basate sull'effettivo utilizzo e sull'andamento delle performance.

SteelcoBelimed



Group Member

Innovate with confidence

