


Série VS G2

Stérilisateurs à vapeur

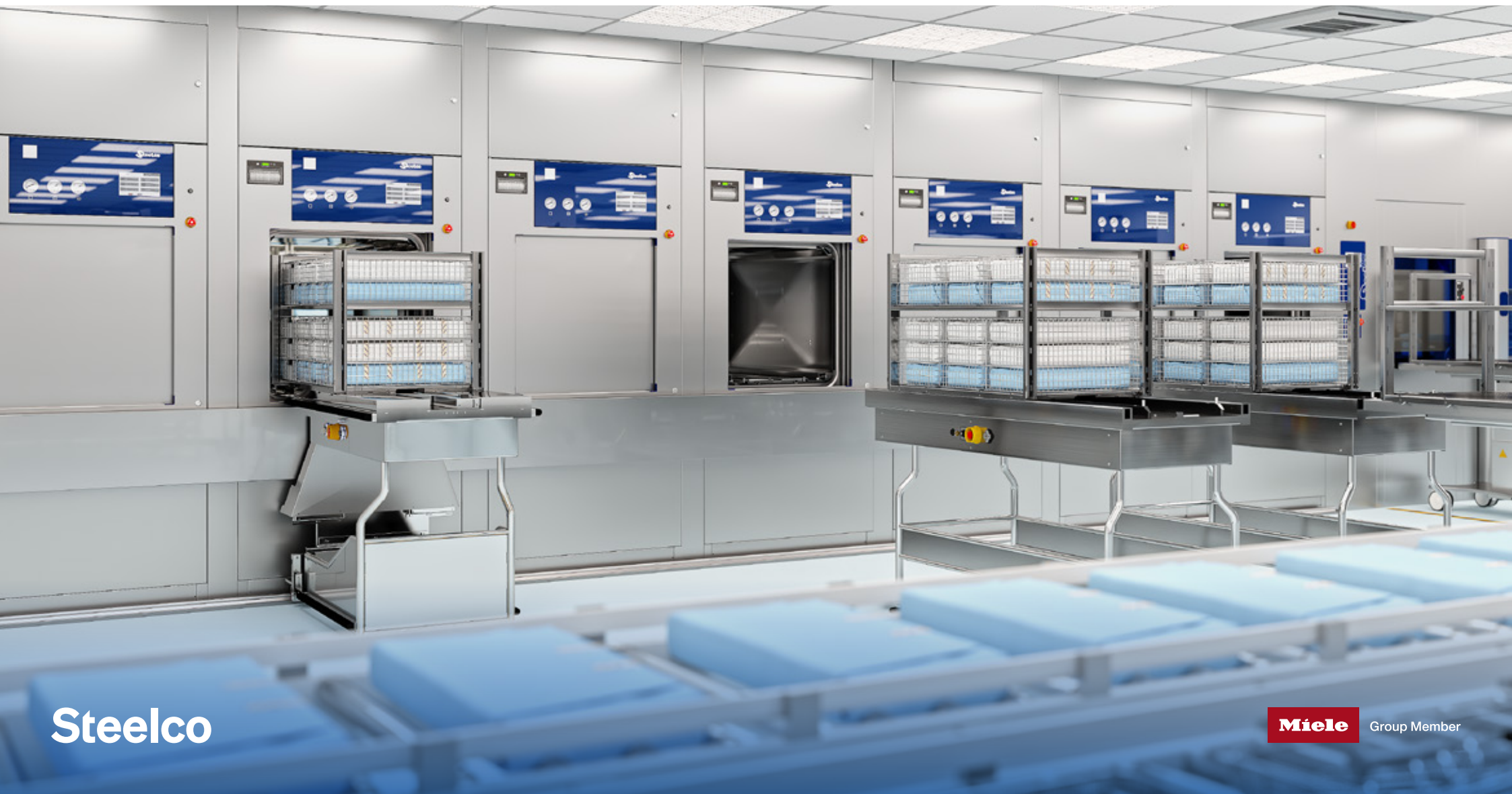

Steelco

Miele Group Member

Fabricant et fournisseur mondial pour les solutions de nettoyage et de stérilisation

Né de Steelco et Belimed, SteelcoBelimed est un pionnier des solutions de flux de travail stériles alliant innovation, fiabilité et orientation client. "Innover en toute confiance" définit notre engagement à fournir des produits et des services de haute qualité, en établissant de nouvelles normes industrielles dans le domaine du contrôle des infections et des sciences de la vie.

Orientation client

Notre engagement à comprendre pleinement les besoins et la satisfaction de nos clients est une priorité. Nos produits et services sont conçus pour répondre à ces besoins spécifiques, garantissant que chaque décision prise profite à nos clients pour les meilleurs résultats.

Innovation

Notre volonté à innover nous pousse à chercher et à adopter en permanence de nouvelles idées, technologies et méthodes. Cet engagement garantit l'évolution et l'amélioration constantes de nos produits et services.

Durabilité

Notre planète, notre responsabilité.
Chez SteelcoBelimed, le développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons : de l'optimisation des processus de production à la réduction de la consommation d'énergie, à la création de produits qui favorisent la protection de l'environnement. Pour nous, protéger l'avenir signifie agir aujourd'hui. Avec intégrité, détermination et un profond respect des personnes et de la planète.



Fiabilité

Notre engagement est d'atteindre les plus hauts niveaux de productivité grâce à l'optimisation des processus, des ressources et des opérations. En proposant systématiquement des solutions fiables, nous assurons la création de valeur tout en minimisant les inefficacités. Notre objectif est d'établir des relations durables fondées sur la confiance, l'intégrité et le respect mutuel en honorant nos engagements de manière fiable.

Série VS G2

Autoclaves stérilisantes à vapeur

Nous avons développé une gamme complète de stérilisateur vapeur de grande capacité pour une solution parfaite, de la plus petite installation au plus grand service central de stérilisation.

Les stérilisateur Steelco offrent : polyvalence, sécurité, haute performance, faible coût de possession et traçabilité. Les stérilisateur à vapeur de la série VS G2 définissent une nouvelle norme en matière de qualité, d'ergonomie et de sécurité !



VS G2

Configuration étroite - 950 mm de largeur. Portes coulissantes verticales.
Volume de la chambre De 333 à 966 lt / 11.37 à 34.11 cu ft.
Capacité de charge 4 - 6 - 8 - 10 - 12 Ust



VS SC G2

Configuration plus large - 1250 mm de largeur. Portes coulissantes verticales.
Volume de la chambre De 333 à 966 lt / 11.37 à 34.11 cu ft.
Capacité de charge 4 - 6 - 8 - 10 - 12 Ust



VS H G2

Configuration plus large - 1660 mm de largeur. Portes coulissantes horizontales.
Volume de la chambre De 530 à 1539 lt / 18.71 à 54.32 cu ft.
Capacité de charge 6 - 9 - 12 - 15 - 18 Ust

Principaux avantages

une combinaison gagnante



Accent mis sur la qualité du processus

Bien que la stérilisation à la vapeur soit un procédé éprouvé, l'innovation permet de réduire les manipulations manuelles, d'améliorer l'efficacité du cycle et la sécurité tout en réduisant la durée du procédé et la consommation d'énergie.

Découvrez ce que notre R&D a mis au point en mettant l'accent sur la qualité des processus !

Conformité aux normes

Nos stérilisateur sont conformes à

Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux :

- 2017/745/EU et ses versions révisées

Directive européenne relative aux dispositifs médicaux :

- 93/42/CEE et ses versions révisées

Directive sur les équipements sous pression :

- PED 2014/68/EU

Normes techniques et standards :

- EN 285
- EN ISO 14971
- UNI EN ISO 17665-1
- IEC EN 61010-1
- IEC EN 61010-2-040
- EN 62366-1
- IEC EN 61326-1





Options ECO avancées



Nos stérilisateurs sont équipés d'options ECO qui permettent d'obtenir les meilleures réductions de consommation d'énergie et d'eau de leur catégorie, garantissant ainsi les coûts d'exploitation les plus bas par cycle.

Nos systèmes avancés de contrôle des processus de stérilisation et nos solutions de traçabilité numérique permettent d'obtenir des avantages supplémentaires en matière de développement durable.

Vitesse de traitement optimisée

Notre objectif est de fournir à nos clients les processus de stérilisation les plus rapides possibles, conformément aux normes internationales et locales, en tenant toujours compte du chargement et du système de barrière stérile.

La pompe à vide à anneau liquide à deux étages garantit des processus plus rapides et est parfaitement adaptée à la taille de la chambre. Les options de pompe à vide et les options ECO contribuent également à réduire la durée des processus.

Options de chargement multiples

Steelco propose une large gamme d'accessoires pour améliorer l'efficacité de la stérilisation centrale, notamment des chariots de chargement, des systèmes d'empilage de paniers et de conteneurs, des chariots de transfert à hauteur réglable, des convoyeurs et des solutions de passage. Le "Easy-Load System" pour les charges empilables élimine le besoin de racks de chargement et de trappes de passage, ce qui simplifie le flux de travail et permet d'économiser de l'espace.


Solutions d'optimisation de l'agencement

La large gamme de modèles et la combinaison de systèmes manuels et automatisés de (dé) chargement permettent d'optimiser les solutions d'agencement. Steelco peut fournir des services de planification architecturale en 3D pour aider les chefs d'équipe de la stérilisation centrale à personnaliser les configurations d'agencement pour les nouveaux projets ou les projets de rénovation.

Les stérilisateurs Steelco peuvent être expédiés en sections segmentées pour surmonter les limitations architecturales telles que les portes étroites ou les ascenseurs.

Sécurité et performance

Un ensemble cohérent

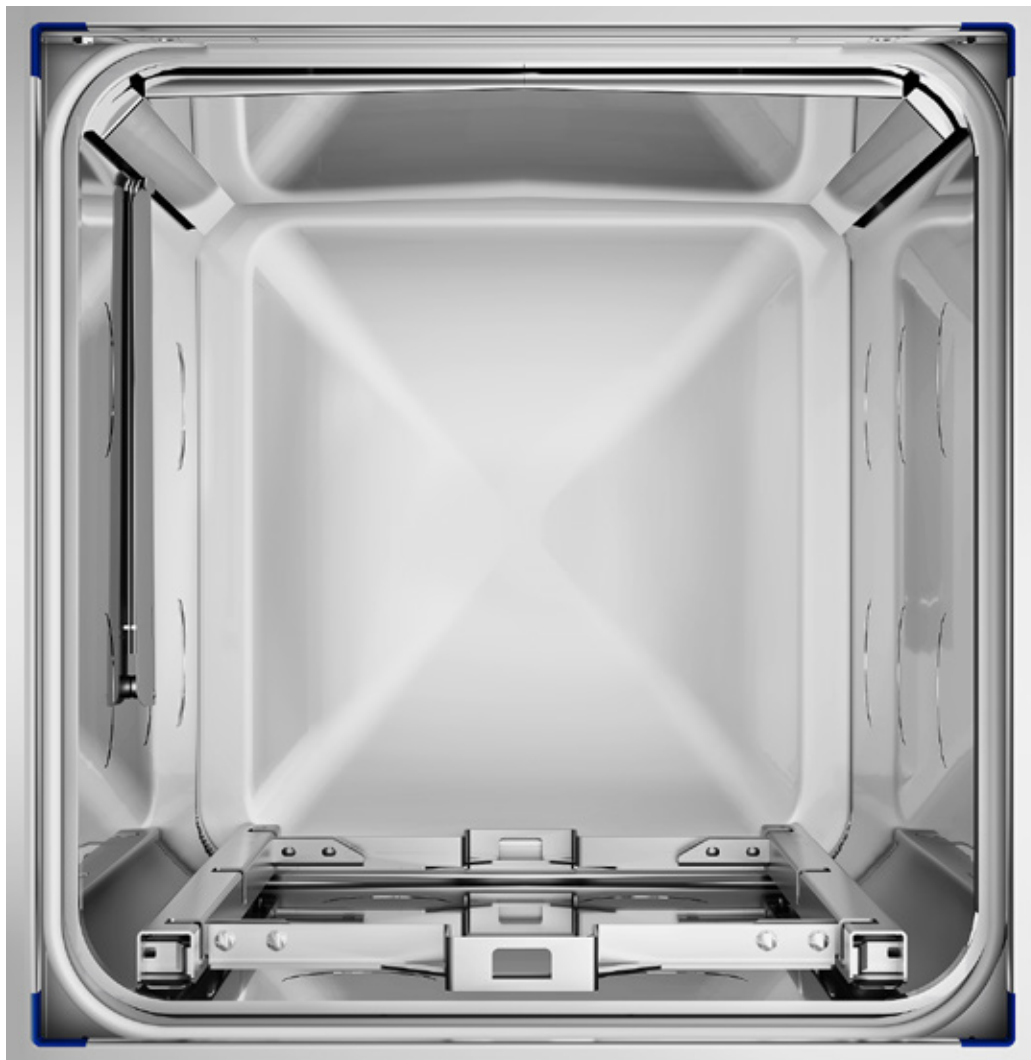

Les stérilisateurs Steelco VS G2 sont conçus pour combiner une construction robuste avec des solutions techniques avancées qui garantissent les normes les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité et de fiabilité des processus.

De la conception de la chambre à la production de vapeur, chaque composant est optimisé pour offrir des performances constantes, des durées de cycle réduites et une durabilité à long terme.

Vitesse de traitement optimisée

- La conception carrée de la chambre réduit l'espace mort pour améliorer le chargement et le débit.
- Les pompes à vide s'adaptent à la taille de la chambre pour des cycles plus rapides ; elles sont disponibles en version à anneau d'eau à double étage ou sans eau.
- L'onduleur optionnel maintient le système de contrôle en marche jusqu'à 5 minutes en cas de panne de courant.

Accent mis sur la qualité du processus

- L'isolation de première qualité de l'enveloppe et de la chambre permet un chauffage rapide, des économies d'énergie et des cycles plus courts.
- Les composants en AISI 316L garantissent une fiabilité à long terme et une vapeur propre.
- L'injection directe de vapeur dans les joints, l'enveloppe et la chambre améliore la qualité et la sécurité.
- Le dégazage intégré réduit les niveaux de NCG dans l'eau de la vapeur.

Options d'alimentation en vapeur

Les stérilisateurs sont disponibles avec une alimentation externe directe en vapeur propre (type "V") ainsi qu'avec plusieurs choix de générateurs de vapeur intégrés ou à distance :

- type "E" - chauffage électrique
- type "I" - chauffage indirect à la vapeur connecté à une alimentation externe en vapeur industrielle
- type "E/V", "I/V" - combinant la source de vapeur externe avec un générateur de vapeur pour servir de solution de secours en cas d'interruption de l'approvisionnement en vapeur


Conception durable

Nos appareils sont fabriqués en Europe, avec de l'acier et des composants clés provenant de fournisseurs européens de confiance. Cette politique d'approvisionnement basée sur la proximité garantit non seulement la qualité et la fiabilité, mais contribue également à réduire l'empreinte carbone globale.



A la pointe de la sécurité des procédés

NCG et 4D^{IR} Sensor

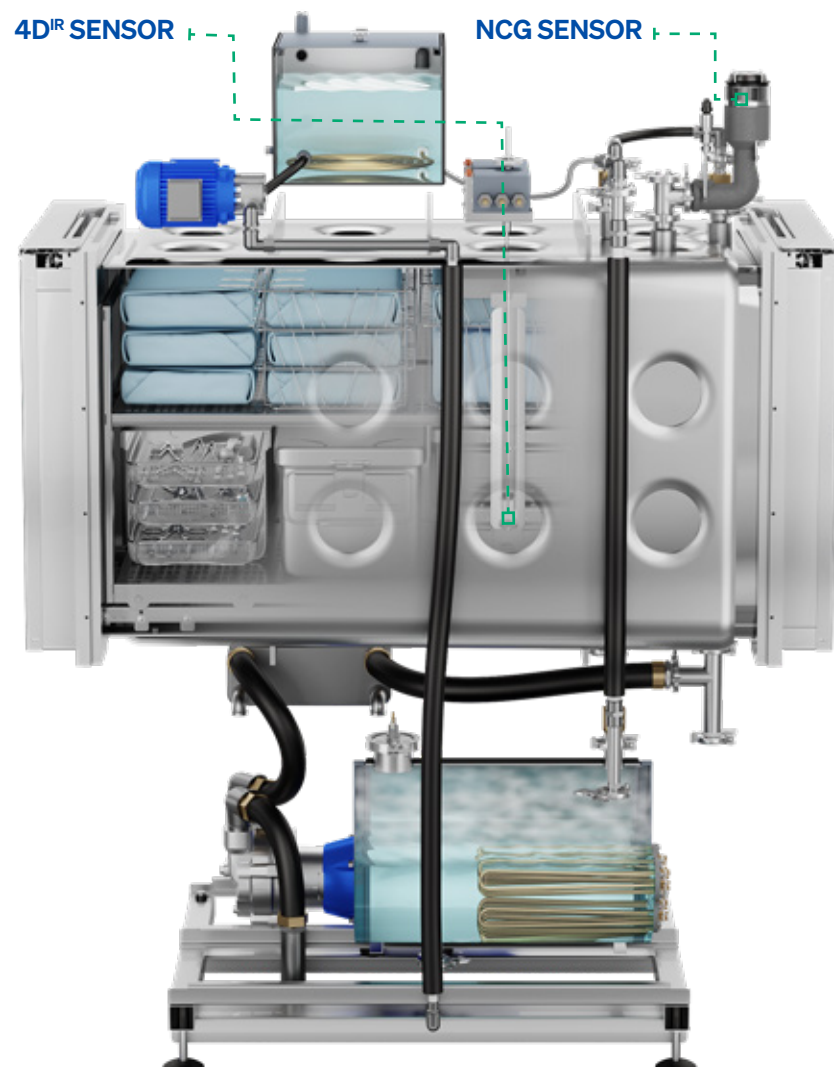

Augmentez la sécurité des processus au-delà des normes actuelles et améliorez la durabilité environnementale en éliminant les tests quotidiens de pénétration de la vapeur, les contrôles périodiques d'élimination de l'air et l'utilisation routinière d'indicateurs de processus, et réalisez des économies mesurables maintenant possibles !

NCG sensor

La mesure des gaz non condensables (NCG) dans la stérilisation à la vapeur n'a jamais été aussi facile. Le capteur surveille la quantité de NCG et la température de la chambre, vérifiant automatiquement la quantité de NCG et la qualité de la vapeur dans la chambre conformément à la norme EN285:2015. Cela permet une libération paramétrique de la charge, basée sur des valeurs directement mesurées et fiables.

4D^{IR} sensor

Depuis le test de Bowie & Dick (1963), le capteur 4D constitue une percée en matière de sécurité du stérilisateur vapeur. Il s'agit de la seule solution commerciale qui surveille entièrement les conditions de stérilisation, conformément aux exigences de la norme EN 285. Il mesure directement la présence, la densité et la pénétration de la vapeur à l'extrémité fermée d'un tube métallique de 70 cm simulant l'instrument creux le plus exigeant dans le "pire des cas", emballé dans un système de barrière stérile. Le capteur 4D^{IR} est conforme aux normes ISO 11140-4 et 11140-6

Conformité et ressources

Nous fournissons une documentation complète sur la conformité et des guides pratiques, y compris :

- Q&R pour une introduction rapide à la façon dont les capteurs Steelco améliorent la sécurité de la stérilisation
- Littérature scientifique avec commentaires et avis d'experts
- Des ressources approfondies sur des sujets connexes

Disponibles sur demande ou directement sur notre site web.



Surveillance du processus du stérilisateur écologique



Nos capteurs remplacent les indicateurs chimiques et biologiques par une solution propre et durable. Aucun transport, stockage ou élimination de matériaux indicateurs n'est nécessaire, ce qui permet de réduire les déchets, la logistique et l'impact sur l'environnement et d'évoluer vers des processus de stérilisation plus écologiques et plus responsables, avec une assurance de stérilité maximale.

Effacité et durabilité


Un ensemble cohérent

Options ECO avancées : niveaux d'efficacité inégalés, réduction de la consommation d'énergie et d'eau avec les coûts d'exploitation les plus bas par charge. Même lorsque les stérilisateur sont déjà efficaces par rapport aux modèles équivalents de la concurrence, Steelco a introduit les packs d'économie d'eau ECO pour aider ses clients à économiser encore plus d'eau.

Chaque goutte compte !


La consommation annuelle d'eau en litres d'une stérilisation centrale d'un hôpital universitaire typique avec 4 unités de stérilisateur à vapeur d'eau de 18 Ust (15 cycles par jour, 6 jours par semaine, 52 semaines par an) sans système d'économie d'eau peut s'élever à 6 458 400 litres. Cette consommation peut être réduite à moins d'un dixième ou à zéro avec les options ECO !

Nous indiquons les économies d'eau réalisées par rapport à nos machines standard, et non par rapport aux machines les moins performantes d'autres entreprises. Seuls les chiffres de consommation réelle pour des cycles spécifiques, avec et sans les options d'économie d'eau, permettent une comparaison réaliste.

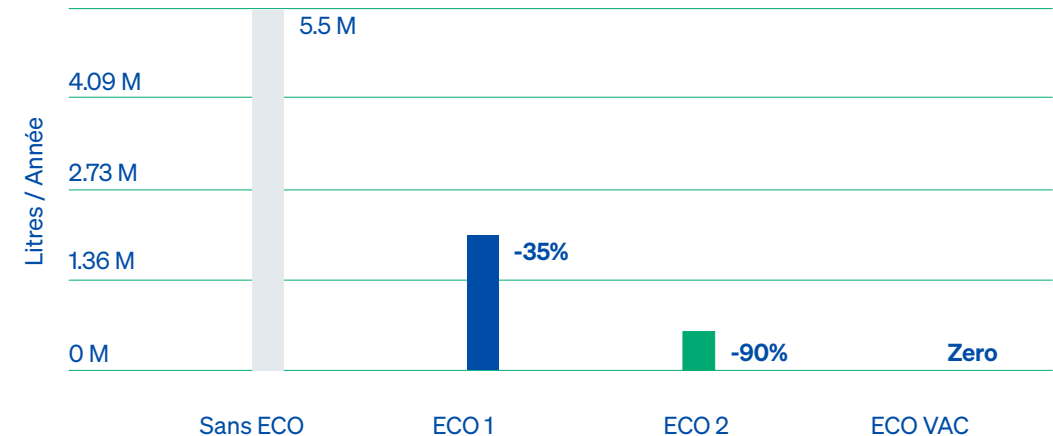

ECO 1

Pack standard d'économie d'eau

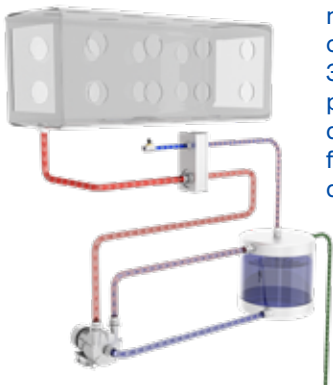

Inclus en standard dans tous nos stérilisateur, ECO 1 reflète notre engagement en matière de responsabilité environnementale. Ce système réduit la consommation d'eau d'environ 35 %, en utilisant moins d'eau pour refroidir la décharge du drain - une solution de base efficace pour un fonctionnement durable.

ECO 2

système avancé d'économie d'eau



Conçu pour les installations ayant accès à un circuit d'eau réfrigérée, ECO 2 permet d'économiser plus de 90 % d'eau lors du fonctionnement de la pompe à vide. Les échangeurs de chaleur à haut rendement éliminent le besoin d'eau du robinet supplémentaire pour refroidir la décharge du drain, ce qui constitue une amélioration importante pour les départements à haut débit.

EcoVac


pompe à vide sans eau

Pour les sites où l'eau est rare ou coûteuse, EcoVac offre une solution totalement indépendante de l'eau.


Cette option de pompe à vide assure une élimination fiable de l'air sans utiliser d'eau, ce qui contribue à réduire les coûts des services publics et à simplifier la maintenance, ce qui est idéal pour les environnements de stérilisation soucieux des ressources.

Fiabilité et facilité d'entretien

Un ensemble cohérent

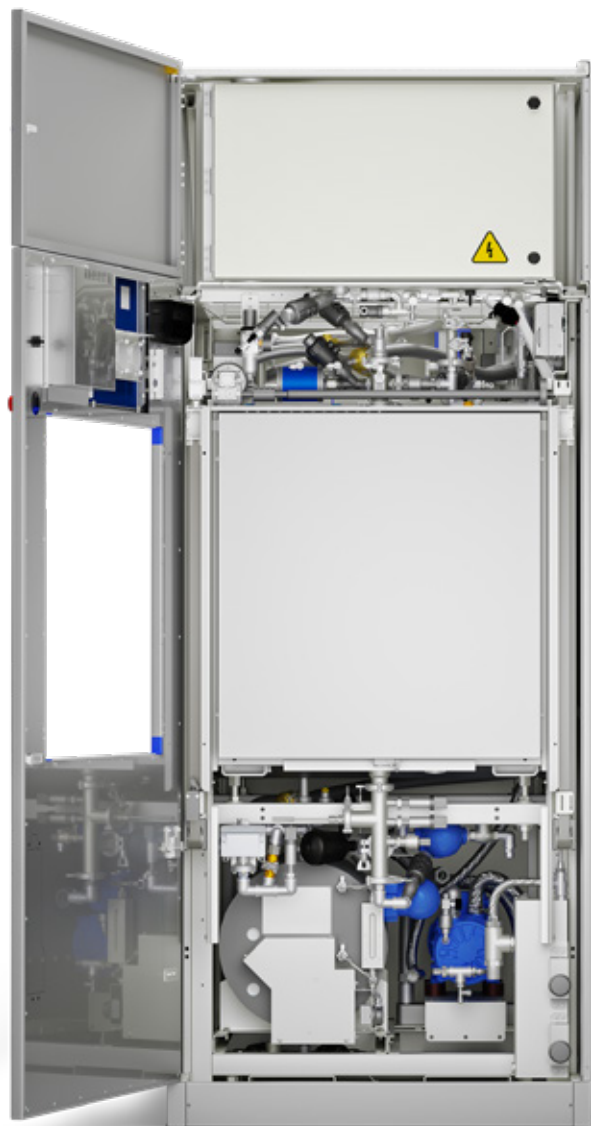

Les chambres en acier inoxydable de haute qualité et la tuyauterie isolée garantissent la durabilité et la propreté de la vapeur, tandis que l'installation sans espace et les composants accessibles simplifient la maintenance. Un traitement adéquat de l'eau protège les performances et prolonge la durée de vie de l'appareil.

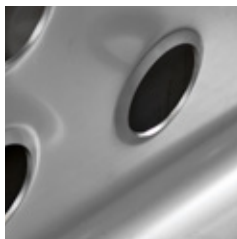

Des matériaux de qualité supérieure, des appareils conçus pour durer

La chambre du stérilisateur et la tuyauterie de vapeur sont fabriquées en acier inoxydable AISI 316 L de haute qualité, ce qui garantit la fiabilité à long terme et la propreté de la vapeur.




Les chambres et la tuyauterie en acier inoxydable résistant aux acides sont entièrement isolées avec un isolant thermique sans CFC qui est facile à enlever et à remettre en place en cas de besoin d'entretien. Pour faciliter l'entretien, la plupart des tuyaux sont raccordés à l'aide de colliers de serrage en acier inoxydable et les principaux composants, tels que la pompe à vide, sont installés sur des rails coulissants.



Encombrement et exigences de service minimisés

Les stériliseurs à vapeur de la série VS G2 sont conçus pour une installation latérale sans encombrement. L'entretien est entièrement frontal grâce à la porte à charnières qui s'ouvre complètement (et par l'arrière dans le cas d'une version à double porte), ce qui permet d'accéder à tous les composants.

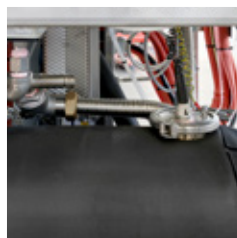

L'entretien de cette gamme de dispositifs est rationalisé, hautement simplifié et rentable.

L'entretien complet du côté du déchargement est optionnel.

Une stérilisation à la vapeur efficace nécessite une qualité d'eau correcte

Une qualité d'eau appropriée permet également d'éviter le dépôt de contaminants tels que le calcaire et de prolonger la durée de vie du stérilisateur. Steelco propose une large gamme d'options de traitement de l'eau pour des installations de différentes tailles : adoucisseurs d'eau, systèmes d'osmose inverse et d'eau déminéralisée, refroidisseurs d'eau.

Ergonomie et logistique

Un ensemble cohérent

Steelco optimise les flux de travail en stérilisation grâce à des solutions ergonomiques et flexibles adaptées à chaque stérilisation centrale. Sa gamme complète d'accessoires - y compris les chariots de transfert et le système Easy Load - améliore l'efficacité, favorise le chargement automatique et contribue à réduire les exigences en matière d'espace et de structure.



Chargement à l'aide d'étagères extractibles


- Élimine le besoin de racks de chargement.
- Idéal pour les petits services de stérilisation.
- Équipé de rails latéraux pour empêcher les matériaux stériles de tomber.



Étagères coulissantes au lieu d'un chariot Le rack fixe avec des supports d'étagères perforés est monté de chaque côté des parois de la chambre du stérilisateur. Disponible uniquement pour les versions 4 et 6 Ust.

Grille de chargement pour paniers aux normes ISO

- Flexibilité dans le réglage de la hauteur des niveaux pour maximiser la capacité de charge
- Compatibilité avec les systèmes d'étagères de stockage de la norme ISO
- En cas d'utilisation avec des stérilisateurs à double porte, il est recommandé de prévoir une trappe/fenêtre de retour
- Disponibilité de chariots de transfert réglables en hauteur et à hauteur fixe

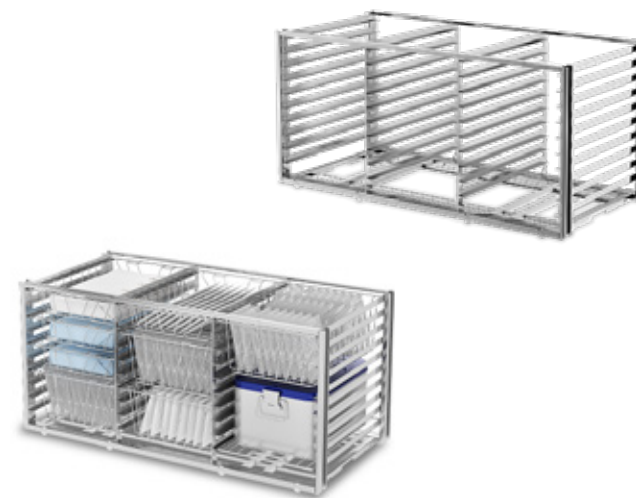

Rayonnages de chargement munis de glissières sur 9 niveaux pouvant être utilisés pour les paniers de stérilisateur, ainsi que des étagères en fil de fer pour un usage général, disponibles pour des capacités de 6 et 8 Ust.

Chargement à l'aide d'étagères de chargement

- Convient à toutes les tailles de conteneurs/paniers
- Pour les stérilisateurs à double porte, il est recommandé d'installer une trappe/fenêtre de retour
- Il existe des chariots de transfert à hauteur fixe, à hauteur réglable et à hauteur réglable avec système de chargement et de déchargement semi-automatique.



Rayonnages de chargement avec niveaux réglables en hauteur. Chariot de transport fixe ou réglable d'une capacité de 4 à 12 Ust.

Système de chargement facile

- Pour le chargement de paniers empilables et de conteneurs
- Compatibilité avec les systèmes d'étagères de stockage aux normes ISO et DIN
- Gain de place grâce à l'absence de trappe/fenêtre de retour
- Disponibilité de chariots de transfert réglables en hauteur et à hauteur fixe



Disponibilité d'une capacité de 4 à 12 Ust. Les stérilisateurs peuvent être alimentés directement par le chargeur du chariot de transfert ou avec l'aide de systèmes de convoyeurs de chargement et de déchargement automatiques.

Automatisation du chargement et du déchargement

- Convient aux racks et au système Easy Load
- Disponible en charge fractionnée (c'est-à-dire 6+6 ou 9+9 Ust) pour réduire les risques liés à la manipulation de charges lourdes et pour optimiser l'utilisation de l'espace dans la stérilisation centrale
- Convoyeurs automatiques bidirectionnels de chargement et de déchargement des racks pour les stérilisateurs à porte simple ou double



Une gamme complète est disponible pour tous les modèles de stérilisateurs de 4 à 18 Ust, ainsi que pour les combinaisons avec des trappes ou des fenêtres.

Système de chargement facile

Maximiser le temps de fonctionnement, la sécurité et la cohérence

Les stérilisateurs peuvent être alimentés directement par le chargeur du chariot de transfert



Productivité et automatisation

Un ensemble cohérent

Steelco : leader dans les solutions personnalisées
Steelco est réputé pour développer des solutions d'automatisation qui facilitent les tâches quotidiennes de l'utilisateur.



ATS

Système de transfert de transfert

Un système d'automatisation spécialement conçu pour les départements où le temps et l'espace sont critiques. Une navette se déplace le long des stérilisateur et charge automatiquement les casiers dans le premier stérilisateur disponible. L'ATS est disponible pour le chargement et le déchargement.

Avantages du système :

- Réduction du risque de blessures liées au chargement et au déchargement manuels de charges lourdes.
- Sélection automatique du cycle approprié pour le type de marchandises grâce au système de code-barres.
- L'équilibre de la charge de travail entre les stérilisateur améliore l'efficacité et favorise une planification proactive de la maintenance.
- Permet l'installation dans des espaces restreints inaccessibles au chargement manuel ou obstrués par des colonnes
- Nettoyage facile de la zone située sous le système ATS.



M-ATS

Système de transfert automatique mobile

Les AMR (Autonomous Mobile Robot) offrent une solution avancée pour déplacer de grands volumes de marchandises tout en suivant l'ensemble du flux de travail de la stérilisation centrale. L'automatisation de la logistique permet au personnel de se concentrer sur les tâches prioritaires, ce qui stimule la productivité. Idéal pour le chargement/déchargement automatisé des laveurs-désinfecteurs et des stérilisateur, ainsi que pour une logistique efficace à l'intérieur et à l'extérieur de la stérilisation centrale.

En plus des avantages de l'ATS :

- Plus de flexibilité pendant la phase initiale de mise en œuvre dans la configuration des processus, des tâches et des priorités.
- Manipulation sûre et efficace en présence de personnes et d'obstacles, sans interruption de service.
- Reconnaissance automatique des positions clés du flux de travail et des stations de chargement.
- Guidage auto-apprenant permettant aux AGV de se déplacer librement, même dans des espaces limités, et de tourner à 360°, évitant ainsi les temps d'arrêt et maintenant un niveau de fonctionnement constant tout au long de la journée.

Planification et conception

la meilleure solution pour chaque besoin

Grâce à sa large gamme d'appareils et de solutions, SteelcoBelimed peut offrir une réponse optimale aux applications les plus difficiles en combinant de manière appropriée des laveurs, des stérilisateurs, des meubles et des systèmes d'automatisation. Un portefeuille complet nous permet de fournir des solutions de traitement stérile complètes et sur mesure - des petites cliniques aux grands services de retraitement centralisés.



Notre service de planification des systèmes, basé sur la modélisation architecturale en 3D, aide les clients à définir les configurations optimales pour les nouvelles installations et les projets de rénovation.



Flexibilité et contrôle

Un ensemble cohérent



L'interface HMI offre des visuels clairs et faciles à lire ainsi qu'un contrôle sans effort, même à distance. Conçue pour une efficacité quotidienne, elle simplifie les opérations grâce à une navigation intuitive et un retour d'information en temps réel. Cette conception conviviale, qui s'applique à l'ensemble de nos appareils, garantit des flux de travail fluides et des performances fiables.


Une interface conviviale

Les opérateurs sont assistés à chaque étape de leur interaction avec l'appareil grâce à des commandes claires et faciles à comprendre. Les programmes de cycle peuvent également être sélectionnés à l'aide d'un code-barres ou d'un scanner RFID.

Le grand écran tactile du panneau de commande affiche jusqu'à 10" et "actif" sur les côtés de chargement et de déchargement. Il affiche clairement l'état du cycle et les messages d'alarme, facilitant ainsi le contrôle de l'appareil grâce à des informations claires et faciles à lire.

Mode service technique

Le stérilisateur est conçu avec peu de composants pour simplifier l'entretien. Un panneau synoptique facile à lire permet d'obtenir une vue d'ensemble approfondie de l'état des composants du stérilisateur, ce qui accélère les interventions de maintenance.

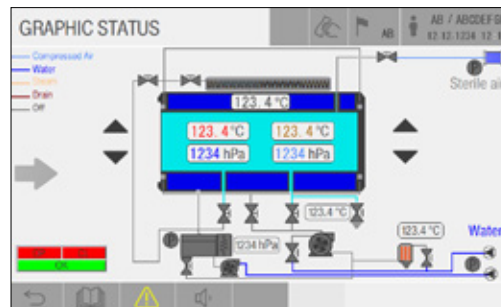

Panneau synoptique facile à lire


Niveaux d'accès utilisateur

L'accès des utilisateurs est divisé en 5 niveaux pour s'assurer que seul le personnel formé a accès à des fonctions spécifiques : opérateur, chef de service, technicien de service sur le site du client, technicien de service autorisé et fabricant.

Grâce à la conception intuitive de l'IHM, en accord avec l'ensemble de notre portefeuille d'appareils, les opérations sont faciles et les processus sûrs.

Stockage des données de cycle

Les données du cycle sont stockées et disponibles à partir de l'imprimante intégrée en option et, si l'appareil est connecté au réseau, les données peuvent être envoyées à un système de traçabilité centralisé.

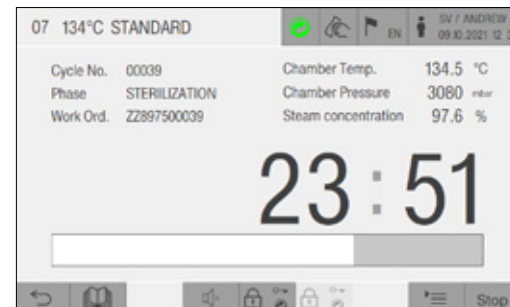

L'état des cycles et les messages d'alarme sont très visibles.

Solution de numérisation

Logiciel de gestion et de suivi

Garantir la disponibilité des instruments au bon endroit, au bon moment, retraités selon les normes appropriées dans les meilleurs délais et au moindre coût.

SmartHub Connect


SmartHub Connect est une solution logicielle sur site qui collecte les données des équipements compatibles et les envoie à un système de suivi des instruments. Les utilisateurs bénéficient d'une transparence totale grâce à un tableau de bord visuel qui affiche l'état des programmes et des cycles pour chaque machine connectée. Le tableau de bord SmartHub Connect est un outil puissant pour une gestion simplifiée et efficace de la stérilisation centrale.

SmartHub Flow

SmartHub Flow est notre logiciel basé sur le web et prêt à l'emploi pour la traçabilité des sets et la localisation des instruments. Conçu pour répondre aux défis posés par la complexité croissante des stérilisations centrales, le logiciel fournit un outil de contrôle précis et sécurisé qui permet d'optimiser progressivement le flux de travail tout en maintenant des normes de productivité élevées. Les informations recueillies sur la production, l'expédition et la gestion des entrepôts permettent une analyse et une quantification précises des coûts, améliorant ainsi l'efficacité économique. Le logiciel est conforme aux normes de sécurité internationales telles que ISO 27001 et ISO 13485.

SmartHub Orbit

SmartHub Orbit est notre application web innovante qui transforme les données des machines en informations exploitables et en valeur ajoutée. Toutes les données pertinentes sur les équipements et les états des cycles sont accessibles depuis n'importe quel appareil, n'importe où et à n'importe quel moment. Les responsables de la stérilisation centrale ont ainsi un contrôle total et révolutionnent leur méthode de travail. SmartHub est conçu pour soutenir l'ensemble de l'équipe de la stérilisation centrale grâce à des fonctionnalités et des mises à jour en constante évolution, telles que l'apprentissage en ligne, le dépannage, la numérisation des processus et les analyses avancées.

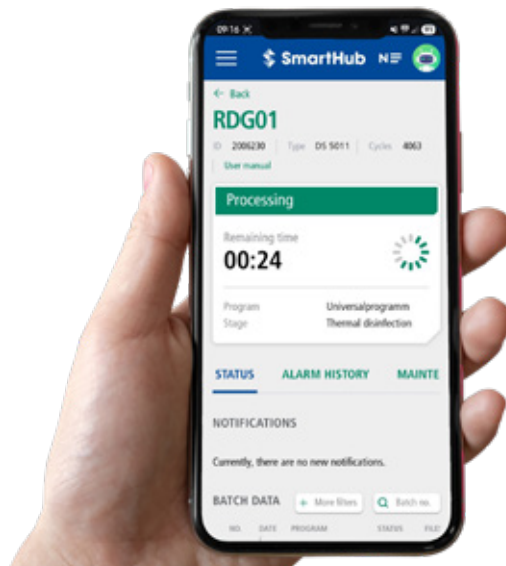

Capacité et dimensions

Dispositions et configurations

Modèle (porte simple et double)		Chambre (LxHxP) - mm			Litres		Encombrement (LxHxP) - mm	
VS 4 G2	670	700	710		333	950	2400	992
VS 4 SC G2	670	700	710		333	1250	1900	992
VS 6 G2	670	700	1010		474	950	2400	1292
VS 6 SC G2	670	700	1010		474	1250	1900	1292
VS 8 G2	670	700	1310		614	950	2400	1592
VS 8 SC G2	670	700	1310		614	1250	1900	1592
VS 10 G2	670	700	1760		825	950	2400	2042
VS 10 SC G2	670	700	1760		825	1250	1900	2042
VS 12 G2	670	700	2060		966	950	2400	2342
VS 12 SC G2	670	700	2060		966	1250	1900	2342

Hauteur de chargement : 850 mm au-dessus du sol fini.

Modèle (porte simple et double)		Chambre (LxHxP) - mm			Litres		Encombrement (LxHxP) - mm	
VS 6 H G2	670	1100	720		530	1660	1900	1004 (*)
VS 9 H G2	670	1100	1062		783	1660	1900	1346 (*)
VS 12 H G2	670	1100	1404		1035	1660	1900	1688 (*)
VS 15 H G2	670	1100	1746		1287	1660	1900	2030 (*)
VS 18 H G2	670	1100	2088		1539	1660	1900	2372 (*)

(*) encombrement au sol (pour les dimensions extérieures, ajouter 11 mm pour les panneaux). Hauteur de chargement : 300 mm au-dessus du sol fini.

Des performances maximisées avec les experts de SteelcoBelimed

Plans de service

Mieux vaut prévenir que guérir. Nos plans de service sur mesure garantissent une disponibilité maximale de l'équipement grâce à une maintenance préventive personnalisée en fonction de l'utilisation de la machine. Que vous fassiez appel à vos propres techniciens ou à notre équipe d'experts, différentes solutions peuvent inclure des visites préventives programmées, des réparations et des pièces détachées, selon les options choisies. Des services additionnels, tels que le nettoyage de la chambre et la surveillance de la qualité de l'eau, permettent d'optimiser les performances et de maîtriser les coûts, afin que vos opérations se déroulent de manière fluide et efficace.

Renseignez-vous auprès de votre représentant SteelcoBelimed local pour connaître la gamme de services proposés dans votre région.

Académie

L'Académie SteelcoBelimed propose une gamme variée de formations adaptées aux besoins spécifiques des professionnels des services de stérilisation. Le centre de formation de pointe situé à Riese, en Italie, dessert pour SteelcoBelimed les divisions Contrôle des infections, Laboratoire et Recherche biomédicale (BMR), avec une capacité impressionnante de formation pouvant accueillir jusqu'à 1100 techniciens par an. L'Académie incarne notre engagement à faire progresser l'ensemble du domaine du traitement stérile. Les professionnels de santé qui suivent une formation ici acquièrent des connaissances qui vont au-delà du fonctionnement des équipements pour englober la prévention des infections et l'optimisation des processus de stérilisation. Ces connaissances se traduisent directement par une amélioration de la sécurité des patients et de l'efficacité opérationnelle dans leurs établissements.

Contrats TCO

Nos contrats TCO (Total Cost of Ownership) offrent une solution pluriannuelle de service à coût fixe qui garantit la stabilité budgétaire et une valeur à long terme. En fixant les tarifs et en minimisant l'exposition à la hausse des coûts, ces contrats permettent une planification financière claire. Idéaux pour prolonger la durée de vie de votre équipement, ces forfaits tout compris réduisent les coûts d'exploitation, protègent les investissements et soutiennent les objectifs de durabilité tout au long du cycle de vie de l'équipement.

Digitalisation

Nos solutions digitales donnent accès à des données en temps réel sur les équipements, aidant ainsi les équipes de maintenance à surveiller les performances et à identifier plus rapidement tout problème potentiel. Des tableaux de bord clairs et des alertes automatisées permettent une maintenance prédictive et plus efficace. Ces outils favorisent une meilleure planification, réduisent les temps d'arrêt imprévus et simplifient la mise en conformité. En intégrant des flux de travail numériques dans les routines de maintenance, les établissements peuvent améliorer la fiabilité et prendre des décisions plus éclairées basées sur l'utilisation réelle et les tendances de performance.

SteelcoBelimed  Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-02-Steelco VS G2 Series FR Rev.06.pdf

Les produits proposés à la vente peuvent différer de ceux décrits ou illustrés dans cette brochure en raison de modifications ultérieures de la production et/ou de configurations optionnelles.

Les produits et les spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter votre revendeur Steelco pour obtenir les informations les plus récentes.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com



* Seulement pour les produits listés
dans les certificats 065/MDR et 1652/
MDD