

Laveurs-désinfecteurs sous paillasse

pour les cabinets médicaux et les cliniques



Steelco

Miele Group Member

Fabricant et fournisseur mondial de solutions de nettoyage et de stérilisation

Née de Steelco et Belimed, SteelcoBelimed est un pionnier des solutions de flux de travail stérile grâce à l'innovation, à la fiabilité et à l'orientation client. "Innover en toute confiance" définit notre engagement à fournir des produits et des services de haute qualité, établissant de nouvelles normes industrielles dans le domaine de la lutte contre les infections et des sciences de la vie.

Centrage sur le client

Notre engagement à comprendre pleinement les besoins et la satisfaction de nos clients est une priorité.

Nos produits et services sont conçus pour répondre à ces besoins spécifiques, en veillant à ce que chaque décision que nous prenons profite à nos clients pour obtenir les meilleurs résultats.

Efficacité

Nous nous efforçons d'atteindre une productivité maximale en optimisant nos processus, nos ressources et nos opérations.

Notre objectif est de fournir des solutions et des services rapidement et efficacement, sans compromis, en minimisant le gaspillage et en maximisant la valeur.

Innovation

Notre volonté de progresser nous pousse à rechercher et à adopter en permanence de nouvelles idées, technologies et méthodes.

Cet engagement garantit que nos produits et services évoluent et s'améliorent continuellement.

Fiabilité

Nous tenons notre parole et fournissons à chaque fois des solutions solides et fiables.

Notre objectif est de forger des relations durables basées sur la confiance et le respect mutuel en respectant constamment nos engagements.

Laveurs-désinfecteurs sous paillasse pour les cabinets médicaux et les cliniques

Une gamme complète de laveurs-désinfecteurs sous-plan pour le retraitement des dispositifs médicaux dans les cabinets médicaux et les cliniques.

Chaque modèle offre des résultats de nettoyage inégalés et des systèmes de séchage sur mesure pour les charges générales et les instruments à lumière. Tous les modèles partagent la même gamme complète d'accessoires de chargement.



DS 5010

avec **séchage Eco**
Largeur 60 cm, porte en acier
inoxydable ou en verre

DS 5011

avec séchage **Active**
Largeur 60 cm, porte en acier
inoxydable

DS 5020

avec **séchage actif**
90 cm de largeur, porte en verre

Conçue pour offrir des performances, une flexibilité et une durabilité maximales, notre nouvelle gamme de laveurs-désinfecteurs garantit d'excellents résultats de nettoyage et de séchage dans toutes les spécialités médicales. Grâce à une connectivité intelligente, une utilisation intuitive et un système de chargement modulaire, ces unités offrent une efficacité inégalée, une fiabilité à long terme et une intégration fluide dans les flux de travail stériles modernes.



Haute capacité

Des performances exceptionnelles dans toutes les spécialités !

Il peut accueillir jusqu'à 8 plateaux DIN, 44 instruments creux ORL avec chargement supplémentaire, ou 42 spéculums ORL – et bien plus encore.

Le système flexible de supports de charge et d'inserts permet des configurations personnalisées, contribuant à réduire les coûts d'approvisionnement et les besoins de stockage.



Conformité aux normes

Le laveur-désinfecteur est conforme aux normes internationales EN ISO 15883-1/2/5/6.

Prêt, feu, partez !

Mise en service optimisée et positionnement des composants facilitant les opérations de maintenance.



Effacité et facilité d'utilisation une combinaison gagnante



Effacité et durabilité accrues

Des performances de nettoyage exceptionnelles grâce à la pompe à vitesse variable, le plus haut degré possible de fiabilité des processus grâce à la technologie des capteurs et l'hygiène grâce à la chambre de lavage sans interstices et au système de filtrage à plusieurs étages.

Conçu pour la longévité, avec une durée de vie opérationnelle garantie de 15 000 heures et un support de pièces détachées pendant 15 ans, votre investissement vous permet d'améliorer votre pratique quotidienne pour les années à venir.



Fonctionnement sans effort

L'écran tactile couleur convivial offre une navigation intuitive, un accès rapide aux programmes favoris et une **vue d'ensemble claire de l'état de l'appareil**. Interface multilingue permettant de changer rapidement de langue, même en cours d'utilisation, et **guides pratiques à l'écran**.

Fonction AutoClose : il suffit d'effleurer la porte pour qu'elle se ferme automatiquement.

L'éclairage de la chambre simplifie le chargement, tandis que les modèles dotés d'une porte en verre avec fenêtre de visualisation permettent de suivre le processus de nettoyage en temps réel.



Performance et durabilité

Unis dans un même élan

Qu'il s'agisse d'instruments délicats ou de demandes à haut débit, cette gamme établit de nouvelles normes en matière d'hygiène, de facilité d'utilisation et de responsabilité environnementale.



Options de séchage avancées

Séchage éco : idéal pour les articles courants, il réduit la consommation d'énergie tout en assurant un séchage en douceur. Disponible pour le DS 5010.

L'ouverture automatique de la porte à la fin du cycle permet à l'humidité résiduelle de s'échapper naturellement, ce qui accélère le séchage.

Séchage actif : le séchage actif à l'air chaud avec filtre HEPA 13 assure un séchage rapide et complet, idéal pour les environnements à haut débit et les instruments complexes tels que les objets creux. Disponible pour les modèles DS 5011 et DS 5020.

L'entretien du filtre est facilité par un couvercle situé à l'avant du socle.

Le développement durable en point de mire

Optimisé pour l'efficacité des ressources :

- Cycles de lavage économiques et spécifiques à l'application
- Durées de programme courtes
- Pompe doseuse intégrée pour un dosage précis et automatique du détergent.

Cela permet de réduire la consommation d'eau, d'énergie et de produits de nettoyage, ce qui favorise un fonctionnement respectueux de l'environnement.

Nous comprenons vos besoins

Les feux de courtoisie éclairent le chargement et aident dans des conditions de luminosité difficiles.

Chargement optimisé, résultats supérieurs

Maximiser la capacité de la chambre, améliorer l'efficacité, assurer la fiabilité du processus



Capacité élevée

Pour un retraitement sûr et efficace des dispositifs médicaux, l'offre de supports de charge - y compris les paniers supérieurs et inférieurs, les chariots de charge et les inserts - est conçue pour accepter un large éventail d'instruments. Ces supports utilisent de manière optimale l'espace de la chambre, ce qui permet de traiter un plus grand nombre d'instruments et de matériaux par cycle.

Une plus grande efficacité

La circulation efficace de l'eau et de l'air constitue un autre avantage majeur : le produit de nettoyage et l'air de séchage sont acheminés directement vers les bras de pulvérisation et les systèmes d'injection par des voies courtes, ce qui garantit une efficacité maximale.

La fermeture automatique des vannes d'accouplement lorsqu'elles ne sont pas utilisées contribue à créer des conditions de pression idéales.



Votre processus sous contrôle !

La parfaite conception conjointe du dispositif de lavage et des casiers de chargement permet un contrôle **encore plus précis du processus**.

L'appareil surveille la rotation du bras d'aspersion pendant chaque cycle pour garantir une couverture complète de la charge et des résultats toujours répétables.

Cette fonction est standard sur toutes les configurations de l'appareil !

Une machine, des possibilités infinies

Configurations personnalisables avec une large gamme d'accessoires

A 203

Support de charge pour MIS
Éléments supplémentaires :
2xE 451, E 473, UTS



A 201

Support de charge pour
l'anesthésie



A 207

Support de charge pour
plateaux et cassettes pour
micro-instruments
Éléments supplémentaires :
8xA 314, 8x E 197



A 104, A 151

Combinaison adaptée aux
instruments MIS, d'arthroscopie
et d'urologie
Éléments supplémentaires :
2xE 142, E 379



A 105/1, A 151

Combinaison adaptée à l'ORL
Éléments supplémentaires :
A 837, E 373, E374, E 417/1, E
803, E 379



A 101, A 151

Combinaison adaptée aux
instruments orthopédiques
Éléments supplémentaires :
E 142, E 473/2, E 337/1, E 521/2,
E 146, E 131/1, 6x E 197



APWD 218

Porte-charge pour instruments
chirurgicaux
Comprend :
A 103, A 202, E 142 (6x dans A
202 ou A 103)



A 210

Support de charge pour la
gynécologie
Éléments additionnels :
8xA 314, 8x E 197A 102, A 151, E
416 (4x A 102), E 379



A 101, A 151

Combinaison adaptée aux
chaussures et semelles de
théâtre
Éléments supplémentaires :
A 308, A 307




Système de chargement flexible

Composition des modules

A 101

Panier supérieur - réglable en hauteur avec bras de pulvérisation intégré.


Dégagement vertical :
160 +/- 30 mm

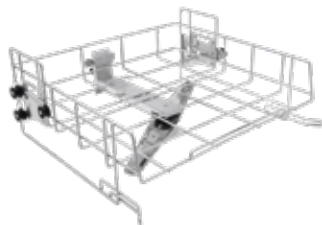

A 103

Panier supérieur avec bras d'aspersion intégré. Convient aux plateaux à mailles DIN

Dégagement vertical :
95 mm

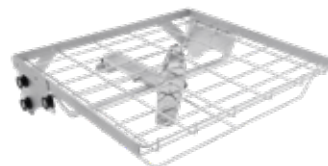

A 208

Support de charge pour plateaux à mailles DIN Le 3^e niveau en partant du bas est amovible.

Dégagement vertical :


Niveau 4 (en haut)	75 mm
Niveau 3	130 mm
Niveau 2 Niveau 3 enlevé	200 mm
Niveau 2	55 mm
Niveau 1 sans la grille	100 mm
Niveau 1 (en bas)	60 mm



A 102

Panier supérieur - réglable en hauteur avec bras de pulvérisation intégré.


Dégagement vertical :
205 +/- 30 mm

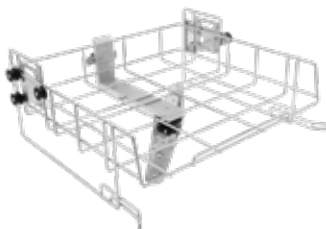

A 104

Panier supérieur avec bras de pulvérisation intégré. Convient aux instruments MIS, d'arthroscopie et d'urologie.

Dégagement vertical :
275 mm

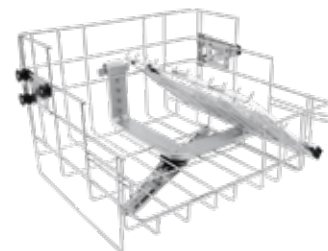

A 201

Support de charge pour anesthésie



A 315/1


Module permettant d'augmenter la capacité de 22 à 44 pièces et de retraiter les instruments à corps creux.



A 105/1

Panier supérieur - réglable en hauteur, sans buses d'injection (22 places), avec bras de pulvérisation intégré. Espace libre supplémentaire pour les inserts.

Dégagement vertical :
215 +/- 30 mm
185 +/- 30 mm collecteur d'injecteurs

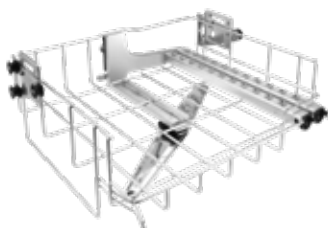

A 204

Porte-charges pour ophtalmologie



Dégagement vertical :

Niveau 2	280 mm
Niveau 1 (bas)	95 mm



A 800

Filtre tubulaire pour collecteurs d'injecteurs



A 804

Brosse pour nettoyer le filtre tubulaire A 800



A 837

Jeu de manchons d'irrigation pour instruments à lumière ORL

A 203

Porte-charge pour instruments MIS jusqu'à une longueur maximale de 550 mm.

Dégagement vertical :

Niveau 1 (bas) 95 mm



A 207

Support de charge pour plateaux avec micro-instruments.

Dégagement vertical :

Niveau 3 220 mm
Niveau 2 60 mm
Niveau 1 (bas) 95 mm



A 314

Porte-écran ophtalmologique - utilisable avec ou sans raccord d'injection pour instruments creux.

A 202

Support de charge pour plateaux à mailles DIN. Il peut être utilisé en combinaison avec le panier supérieur A 103.

Dégagement vertical :

Niveau 2 135 mm
Niveau 1 sans la grille 135 mm
Niveau 1 (en bas) 95 mm




A 151

Panier inférieur

Combinaisons de dégagement vertical :

A100	240 mm
A101	265 +/- 30 mm
A102	225 +/- 30 mm
A103	305 mm
A104	145 mm
A105	210 mm

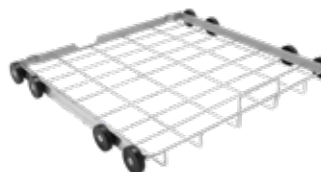

A 310

Insert pour jusqu'à 8 chaussures de théâtre, jusqu'à la taille 41



A 307

Insert pour jusqu'à 20 chaussures de théâtre, jusqu'à la taille 48



A 308

Insert pour jusqu'à 34 semelles pour chaussures de théâtre

Articles d'application croisée



E 451

Plateaux en treillis pour divers instruments



E 473/2

Panier à mailles fines à suspendre pour petite vaisselle



E 337/1

Insert pour instruments debout



UTS

Boîte à 3 compartiments avec couvercle pour le nettoyage des petites pièces



E 142

Plateau DIN-Mesh



E 373

Pour un chargement optimal des instruments ORL



E 379

Insert pour le maintien de différents instruments



E 374

Pour un chargement optimal des instruments ORL



E 131/1

pour le chargement optimal de cinq plateaux à mailles ou à reins



E 146

Plateau avec couvercle pour instruments de gynécologie et d'oto-rhino-laryngologie



E 416

Insert pour spéculums en gynécologie pour 6 spéculums simple et double face



E 803

Insert, filet pour jusqu'à 30 spéculums auriculaires et nasaux




E 417/1

Pour le chargement de jusqu'à 30 spéculums d'oreille et de nez

Pratique et efficace jusque dans les moindres détails

Ces images ne représentent que quelques exemples de la conception avancée des accessoires Steelco.

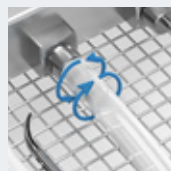

Système de tuyau pivotant anti-torsion pour une connexion facile des instruments, évitant les restrictions de débit d'eau.

Supports, chariots de transfert et composants pour le stockage

UG 30-60/60-85/1

Socle, fermé pour soulever la machine, 60 cm de profondeur, 60 cm de largeur



UG 30-90/60-85/1

Socle, fermé pour soulever l'appareil, avec armoire latérale, 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur



UG 70-60/80/1

Châssis avec porte pour le chargement et le déchargement ergonomique du laveur-désinfecteur - hauteur 70 cm



MC/2

Chariot de transport



PG 8596

Armoire pour produits chimiques et modules de distribution. Capacité : Niveau supérieur : 3 x 5 L Niveau inférieur : 3 x 5 L ou 2 x 10 L



Dimensions et configurations

Modèle	Hauteur	Profondeur	Largeur	Type de porte	Type de séchage
DS 5010	820 mm	598 mm	598 mm	Verre Acier inoxydable	Eco
DS 5011	820 mm	598 mm	598 mm	Acier inoxydable	Actif
DS 5020	820 mm	598 mm	898 mm	Verre	Actif



Connectivité intelligente

Intégré à SmartHub


Vos machines parlent. Êtes-vous à l'écoute ?

La collecte de données à partir de votre équipement par le biais de logiciels d'enregistrement de données permet d'optimiser le flux de travail. Mais qu'en est-il des instruments ? Tracer les instruments tout au long de leur vie dans les hôpitaux - de l'utilisation sur les patients au retraitement dans la stérilisation centrale ou dans des centres de retraitement externes jusqu'à la prochaine utilisation sur les patients - est fondamental pour la sécurité des patients. Nos logiciels SmartHub permettent de collecter, de stocker et d'analyser facilement et automatiquement les données de vos machines, tout en vous fournissant les outils dont vous avez besoin pour suivre et documenter l'historique, l'emplacement et l'utilisation de vos dispositifs médicaux tout au long de leur cycle de vie.

SmartHub Orbit en un coup d'œil

Avec SmartHub Orbit, toutes les données pertinentes sur les machines et les statuts des cycles sont accessibles sur n'importe quel appareil, de n'importe où et à n'importe quel moment. Cela donne aux responsables des processus de stérilisation un contrôle total et transformera la façon dont ils travaillent :

- Une transparence simple avec les statuts des machines pour les laveurs et les stériliseurs en temps réel.
- Une documentation de lot à jour et des notifications de machine à tout moment et en tout lieu.

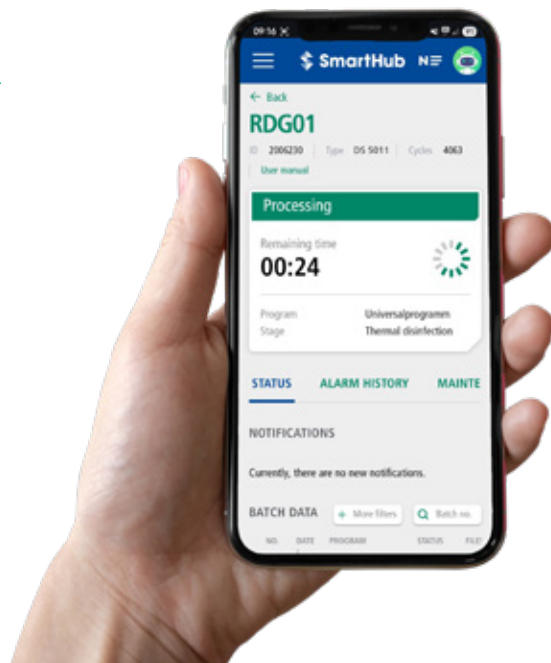

La numérisation progresse rapidement !

Nous développons continuellement nos solutions numériques pour le retraitement intelligent des instruments dans les cliniques. Demandez à votre représentant commercial la liste des dernières nouveautés disponibles.

Des performances maximisées avec les experts de SteelcoBelimed

Avec un réseau mondial de plus de 1 000 techniciens de service certifiés et partenaires de confiance, SteelcoBelimed fournit une assistance technique rapide, fiable et disponible localement pour assurer la performance ininterrompue de votre équipement critique.

Nos équipes sont stratégiquement positionnées dans les régions clés, offrant une expertise approfondie des exigences opérationnelles des hôpitaux, de la fabrication pharmaceutique et des laboratoires de recherche. Qu'il s'agisse de maintenance de routine, de service d'urgence ou d'optimisation des performances, nous répondons avec précision et rapidité.

Plans de service

Nos plans de service personnalisés maximisent le temps de fonctionnement des équipements grâce à une maintenance préventive basée sur l'utilisation. Les options comprennent des visites programmées, des réparations et des pièces détachées, avec des compléments tels que le nettoyage de la chambre et la surveillance de la qualité de l'eau pour améliorer les performances et l'efficacité.

Formation technique certifiée

Notre formation technique certifiée associe cours et apprentissage pratique afin de doter votre équipe des compétences nécessaires pour faire fonctionner, entretenir et dépanner les équipements. Les classes de petite taille garantissent un enseignement personnalisé et les participants reçoivent un certificat à l'issue de la formation, ce qui permet de renforcer les capacités et de minimiser les temps d'arrêt.

Contrats TCO

Nos contrats de coût total de possession offrent des plans de service pluriannuels à coût fixe qui assurent la stabilité du budget, réduisent les coûts d'exploitation et prolongent la durée de vie de l'équipement, offrant ainsi une valeur à long terme et soutenant les objectifs de développement durable.

La numérisation dans le service

Nos solutions numériques offrent une surveillance en temps réel, des tableaux de bord intuitifs et des alertes automatisées pour aider les équipes de service à détecter rapidement les problèmes et à planifier la maintenance plus efficacement. En intégrant ces outils dans les opérations quotidiennes, les installations peuvent réduire les temps d'arrêt, améliorer la fiabilité et prendre des décisions plus intelligentes, basées sur des données.

SteelcoBelimed

Miele Group Member

SteelcoBelimed

Miele

Group Member

Innovate with confidence

DC-PD-02-Steelco DS 5010-11-20 FR Rev.00.pdf

Les produits proposés à la vente peuvent différer de ceux décrits ou illustrés dans cette brochure en raison de modifications ultérieures de la production et/ou de configurations optionnelles. Les produits et les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Veuillez contacter votre revendeur SteelcoBelimed pour obtenir les informations les plus récentes.

Steelco S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039
Riese Pio X (TV) - Italy

steelcobelimed.com

CE₀₂₉₇*

* Marquage CE de l'UE avec organisme notifié.
La déclaration de conformité correspondante
est jointe à la machine et peut être obtenue
auprès du fabricant