

Steelco TTA 23

Miniclaves **Clase B**

para clínicas dentales y médicas





Steelco TTA 23

Miniclaves Clase B

para clínicas dentales y médicas

Pequeño externamente, grande por dentro. Diseñado para la esterilización segura rápida y eficiente de instrumentos sólidos o huecos envueltos y sin envolver y cargas porosas, desarrollado para proteger a los operadores, a los pacientes, el instrumental y el entorno de trabajo.



Fiabilidad

El autoclave Steelco TTA 23 Clase B está certificado y producido para cumplir con la norma EN 13060.

Eficiencia y seguridad gracias a:

- **Conductímetro:** el sensor de conductividad integrado controla la calidad del agua.
- **Separador aire agua:** el dispositivo de separación, diseñado e integrado en el depósito, es un verdadero y auténtico “salvavidas” para la bomba de vacío.

Fácil de usar

Sistema de control y menú intuitivo. Cuenta con pantalla táctil fácil de interpretar y usar, brinda la información necesaria y avisa cuando el equipo requiere servicio.

Se pueden seleccionar diferentes test (Vacío, Helix, Bowie & Dick) y ciclos de esterilización.

Diseñado para adaptarse a su instalación

El modelo Steelco TTA 23 está configurado para la generación de vapor dentro de la cámara.


Se puede conectar al suministro de agua de la red o funcionar como una unidad independiente con llenado manual de agua.



Tamaño compacto

Steelco TTA 23 se ajustan perfectamente a muebles de clínicas médicas y dentales.

An	Pr	Pr+	Al	Al+
460 mm	610 mm	925 mm	455 mm	750 mm

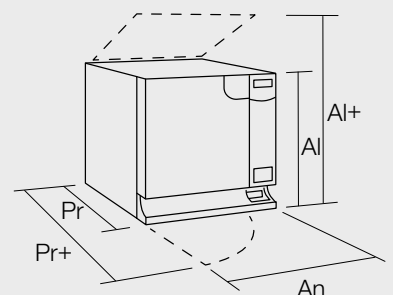

Todo lo que necesitas... simplemente!

ECO FRIENDLY +
Bajo consumo
de agua y energía.



SENCILLEZ
Menú interactivo fácil
de usar con pantalla
clara, información de
ciclo y mensajes de
advertencia.

**BAJO NIVEL
DE RUIDO** +
menos de 50 dB



CONECTIVIDAD +
Sistema de
almacenamiento mediante
una tarjeta SD integrada
como estándar
y conectividad Wi-Fi
opcional.

TRACKING +
Impresora integrada
para datos de ciclos de
esterilización.

**GENERADOR
DE VAPOR** +



Generador de vapor
integrado

MANTENIMIENTO SENCILLO +
El deposito superior se puede abrir de forma
completa para facilitar el acceso, la limpieza y
el mantenimiento.



Accesorios



AQUADIST

Produce agua destilada usada para vapor. 0,7 litros de agua destilada por hora con una capacidad de 4 litros.

Cumple la Directiva 2004/108/CE y 2006/95/CE.



AQUAFILTER

Para la producción de agua desionizada utilizando tecnología de intercambio iónico. Cumple con las necesidades de agua de proceso para autoclaves y otros equipos. Cumple con EN13060 ($<15\mu\text{S} / \text{cm}$).

Producción media de 1 litro de agua por minuto.

Dimensiones, Ancho x Prof x Alto:
390x145x455 mm



PS 2001

El sellador térmico PS 2001 para bolsas presenta un ciclo de temperatura continuo y constante, cumpliendo plenamente con las normas EN 868-5 y EN 11607-2.

Soporte de almacenamiento para rollos con sellado frontal, para la fabricación de bolsas ergonómicas. Pequeña huella para facilitar el posicionamiento en la superficie de trabajo. También puede ser montado sobre la pared o empotrado. Superficie lisa para una fácil limpieza.

Anchura de banda de sellado: 12 mm.


Anchura zona de sellado: 310 mm.

Peso: 7,6 kg.


Dimensiones, Ancho x Prof x Alto:
445 x 385 x 198 mm

LOADING ACCESSORIES

La disponibilidad de accesorios adicionales amplía la flexibilidad de las opciones de carga en autoclave. Un ejemplo es el inserto de carga de la bolsa.

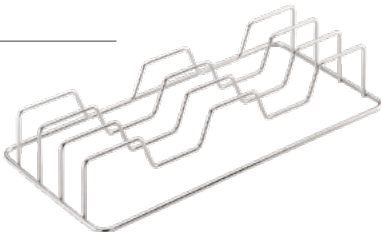


Rack de cargas flexibles

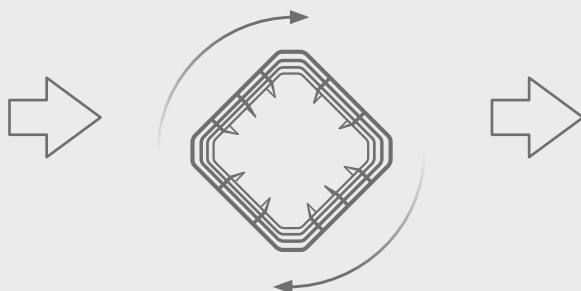

Especificaciones técnicas

TTA 23

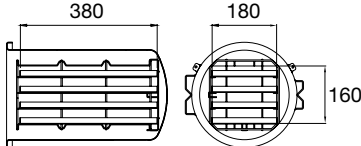Generación de vapor	Dentro de la cámara
Dimensiones de la cámara mm	
Dimensiones externas (Ancho x Profundo x Alto)	460 x 610 x 455 mm
Peso (máquina vacía con cesta y bandejas)	48 kg
Tensión de alimentación 230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Consumo de energía (potencia)	2300 W - 10,0 A
Temperatura de funcionamiento + 5°C /+ 40°C	+5°C / +40°C
Profundidad mínima requerida de la superficie de trabajo	500 mm
Anchura mínima requerida de la superficie de trabajo	460 mm
Nivel de ruido	< 50 dB
Carga máxima de la superficie de trabajo	Load on each foot: 14,3 kg
Rango de operación	Solo para uso interno Elevación < 2000m Humedad relativa: 85% Variación máxima de la tensión de alimentación: ± 10% Categoría de instalación: II - Grado de contaminación: 2
Tamaño y volumen de la cámara	250 Ø x 440 mm
Dimensiones de la cámara y espacio utilizable (An x L x Al)	180 x 380 x 160 mm
Consumo de agua	0,3 litros
Capacidad de los tanques (agua limpia y usada)	5 / 3.5 litros

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrepresión
- Protección contra accidentes con apertura de la puerta
- Monitoreo de ciclos y autodiagnóstico en tiempo real

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

- Manual de usuario
- Declaración de conformidad del autoclave y de la cámara
- Certificado de garantía
- Certificado de instalación
- Manual de servicio

CONFORMIDAD CON NORMAS ARMONIZADAS

- EN 13060
- EN ISO 14971
- EN 61010-1
- EN 61010-2-040
- EN 61326
- EN 13445

ACREDITACIÓN

- Autoclave conforme a 93/42/EEC y las enmiendas
- Dispositivo de clase II b
- La Cámara cumple con la directiva 2014/68/CEE
- Certificación de calidad de la empresa: ISO 9001 e ISO 13485

Ciclos de esterilización rápidos y eficientes

	Temperatura	Presión	Esterilización ⌚	Secado ⌚	24 litros carga máxima sólido/poroso
B134	135,5°C	2,16 bar	4'	15'	6 kg / 2 kg
B134 PRION	135,5°C	2,16 bar	18'	15'	6 kg / 2 kg
B121	122,5°C	1,16 bar	20'	15'	6 kg / 2 kg
B134 ⚡	135,5°C	2,16 bar	3' 5"	4'	0,6 kg / 0,2 kg
B134 PRION ⚡	135,5°C	2,16 bar	18'	4'	0,6 kg / 0,2 kg

Los ciclos están disponibles para artículos sólidos y huecos envueltos o sin envolver y cargas porosas



Miele Group Member

ARES - sistema de reprocesamiento automático de endoscopios flexibles



Lavadoras desinfectadoras para material odontológico

Lavadoras desinfectadoras

Autoclaves de esterilización por vapor



Lavadoras desinfectadoras para centrales de esterilización

Lavadoras desinfectadoras de material de vidrio de laboratorio



Sistemas de lavado y esterilización para material farmacéutico y de ciencias experimentales

Headquarters

STEELCO S.p.A.

Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Branches

STEELCO ASIA

Puchong, Malaysia
info-asia@steelcogroup.com

STEELCO AUSTRIA

Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM

Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX

Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE

Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area)

Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY

Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO

CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC

Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE

Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN

Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND

Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA

West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com



* Sólo para los productos
elencados en el
certificado n. 1918/MDD

Products offered for sale may differ from those described or illustrated in this brochure due to later production changes or/and optional configurations. The products and technical specifications are subjected to change without prior notice. Please consult your Steelco dealer for the latest information.